



Tragekomfort bei jeder Bewegung



DreamWisp Nasenmaske

Optimale Abdichtung und stabiler Halt
in jeder Schlafposition

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Keine Druckstellen und maximale Bewegungsfreiheit

Die DreamWisp vereint das revolutionäre Design der DreamWear mit der hervorragenden Abdichtung der Wisp Nasenmaske. Der komfortable Schlauchrahmen der DreamWear, mit seinem Schlauchanschluss auf dem Kopf, gibt Halt und verhindert das Entstehen von Druckstellen. Gleichzeitig umschließt das Wisp Nasenkissen sanft die Nase und gewährleistet eine optimale Abdichtung.



Optimale Abdichtung mit minimalem Kontakt

Das einzigartige Maskenkissen umschließt die Nasenspitze und ermöglicht so eine hervorragende Abdichtung mit stabilem und komfortablem Halt.

Bei der **Auto-Seal-Technologie** befindet sich über dem Maskenkissen eine **zusätzliche Silikonmembran**, die sich während des Betriebes mit Luft füllt. Dadurch passt sich die Maske automatisch an alle Gesichtskonturen an und sorgt so für eine **optimale Abdichtung**.

Kopfbewegungen während der Nacht **werden durch das Ziehharmonika-Kissen ausgeglichen**, wodurch ein stabiler Halt gewährleistet ist.

Als wäre sie gar nicht da

Die **durchdachte Schlauchführung** ermöglicht einen erholsamen Schlaf in jeder beliebigen Position und verhilft so Anwendern zu **mehr Bewegungsfreiheit in der Nacht**.

Mit der DreamWisp können Sie im Bett **fernsehen, lesen**, sich zur Seite drehen oder sogar **auf dem Bauch schlafen**.

Der besonders weiche Maskenrahmen aus Silikon, durch den die Luft geleitet wird, liegt nur minimal auf, sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und verhindert Abdrücke im Wangenbereich.



Drehbarer Anschluss mit Ausatemöffnung
ermöglicht komfortablen Schlaf in jeder Position

Weicher Silikonrahmen
aus sanftem Material passt sich optimal an die Gesichtsform an und verhindert Abdrücke

Patentiertes Kissen
mit Auto-Seal-Technologie umschließt sanft die Nase für eine optimale Abdichtung

Magnetische Kopfbandclips
für ein einfaches und schnelles Befestigen und Lösen des Kopfbandes

Stoffpolster
zur zusätzlichen Befestigung über den Maskenrahmen



Keine Abdrücke

Das innovative Design und das weiche, flexible Material der DreamWisp Maske verhindert Abdrücke oder unangenehme Reizungen im Nasen- und Wangenbereich.



Volle Bewegungsfreiheit

Mit der DreamWisp können Sie sich im Schlaf wieder völlig frei bewegen, ohne Behinderung durch den Schlauch. Der Schlauch-Anschluss oben am Kopf ermöglicht Ihnen, jederzeit die angenehmste Schlafposition zu finden.



Freie Sicht

Die DreamWisp Maske lässt Ihnen freie Sicht. Sie können ungehindert lesen, fernsehen oder Ihr Tablet nutzen bevor Sie einschlafen. Auch für Brillenträger geeignet.

Anleitung zur Anpassung der DreamWisp Maske

Das DreamWisp Masken-Set beinhaltet einen Silikonrahmen und ein Maskenkissen mit Ausatemöffnungen, zusätzlich einsetzbare Stoffpolster, ein Kopfband und magnetische Verschlussclips.



1. Schritt

Platzieren Sie das Maskenkissen so, dass der obere Kissenrand zwischen dem Nasenrücken und der Nasenspitze sitzt. Lösen Sie einen oder beide Magnetclips von ihren magnetischen Gegenstücken.



2. Schritt

Halten Sie das Maskenkissen auf der Nase und positionieren Sie den Rahmen oben mittig auf dem Kopf. Ziehen Sie das Kopfband über den Hinterkopf und befestigen Sie die Magnetclips an ihren magnetischen Gegenstücken an den unteren Teilen des Kopfbandes.



3. Schritt

Um die Maske exakt anzupassen, stellen Sie die Haltebänder entsprechend nach. Passen Sie die Länge der Bänder an und drücken Sie die Laschen wieder an den Stoff. Ziehen Sie das Kopfband nicht zu fest an.



4. Schritt

Nach Abschluss der Maskeneinstellung sollte der Schlauchanschluss auf der Kopfoberseite mittig aufliegen. Das Maskenkissen sollte komfortabel auf Ihrem Gesicht aufliegen, ohne die Nasenlöcher zu blockieren.

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
DreamWisp Maske, Maskenkissen mit Ausatemventil, Kopfband & Rahmenverbindungsstück (in M) In den Größen: Petite, Small, Medium, Large, Extra Large	78 1137942 (P), 78 1137943 (S), 78 1137944 (M), 78 1137945 (L), 78 1137946 (XL)	1

HABEL Atemzentren ganz in Ihrer Nähe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen.

Sie erhalten modernste Therapiegeräte, umfangreiche und kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite Betreuung.

