



Inbetriebnahme

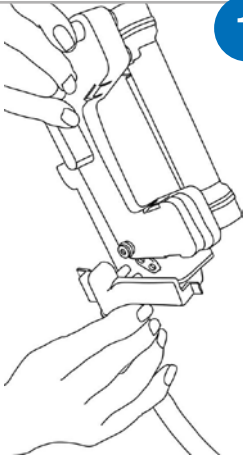


1

Alle Teile
zusammensetzen

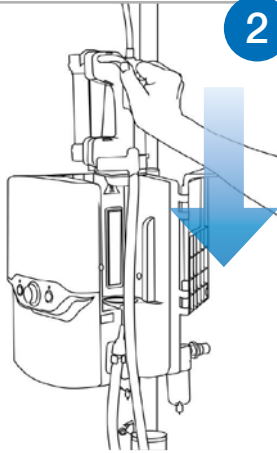


2

System in Docking-
station einsetzen,
herunterdrücken und
Türe schließen

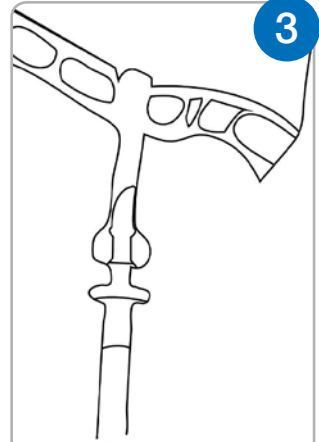

3

Wasserflasche
anschießen und
60–90 Sekunden
entlüften

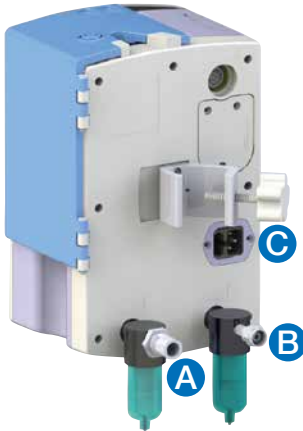

4

Air **A**, O₂ **B** und dann Strom **C**
anschießen



5

Einstellungen vornehmen,
Therapie starten

Wichtige Hinweise

- **Gerät nicht ausschalten!**

Für Therapiepausen reduzieren Sie Flow und FiO₂ auf Minimaleinstellungen.

- **Wechseln Sie die Wasserflasche bevor sie leer ist!**

Die folgende Tabelle zeigt grobe Richtwerte basierend auf 37°C



Flow	Ø-Wasserverbrauch pro Tag	Empf. Wechselintervall
1 – 10 LPM	650 ml	500 ml / 12h
10 – 20 LPM	1300 ml	500 ml / 8h
20 – 30 LPM	2000 ml	1000 ml / 12h
30 – 40 LPM	2600 ml	1000 ml / 8h

- Bei Verwendung von Glas- oder unelastischen Plastikflaschen bitte Belüftungsadapter (Ref: 27PF-WBA) nutzen.

- Der Precision Flow Plus verfügt über drei Betriebsmodi:

Schlaf	Display dunkel, LED orange
Standby	Display blinkt, LED orange
Betrieb	Display an, LED grün

- **Start aus dem Schlafmodus nicht möglich.**

- Halten Sie den Start/Standby Knopf für 2 Sekunden gedrückt, um die Therapie zu stoppen

Nicht vergessen

- Wenn Sie nur 100 % oder 21 % einstellen können, überprüfen Sie die Gasversorgung. Schalten Sie das Gerät in Standby, entfernen Sie das Netzkabel und starten Sie das Gerät erneut.
- Sollte nach dem Flaschenwechsel der Alarm nicht binnen 2 Minuten verschwinden, schalten Sie den Precision Flow Plus in Standby und starten Sie sofort erneut.