

Fiberoptische Intubation mit supraglottischer Atemwegssicherung



Larynxtubus iLTS-D

für ET-Tuben von 6.5 – 8.0 ID
Drainagekanal für Aspirationsschutz

Intubations-Larynxtubus iLTS-D

Ventilation – Gastraler Zugang – Intubation

Bis zu 20% aller Notfallintubationen werden als schwierig eingestuft. Die Verfügbarkeit eines adäquaten Systems ist daher ausschlaggebend für ein effektives Atemwegsmanagement im Notfall. Algorithmen für den schwierigen Atemweg empfehlen die Verwendung von supraglottischen Atemwegshilfen (SGA). Zur Vermeidung einer Aspiration

schreibt der NAP4 Bericht den Einsatz von Produkten mit Drainagekanal vor. Der iLTS-D bietet darüber hinaus die Möglichkeit einer endotrachealen Intubation mittels eines speziell dafür konzipierten Tubus-Sets. Ebenso können Standard ET-Tuben verwendet werden.



1. Ventilation

Das Design der Ventilationsebene optimiert das Tidalvolumen, und verhindert die Verlegung des Atemwegs durch eine nach unten geklappte Epiglottis. Dünnwandige Cuffs garantieren maximalen Airway Leak Pressure, auch bei geringem Cuffdruck.

(Cuffdruck < 60 cmH₂O)

2. Gastraler Zugang

Der Drainagekanal ermöglicht das Einführen einer großen Magensonde, um Aspiration von Mageninhalt zu vermeiden.

Gr. 2.5 / 3 max. 16 CH
Gr. 4 / 5 max. 18 CH



3. Intubation

Der iLTS-D sichert den Atemweg im Notfall und ermöglicht die fiberoptische Platzierung eines ET-Tubus (mit abnehmbarem Konnektor). Während des Intubationsvorgangs muss der supraglottische Atemweg nicht aufgegeben werden.

Gr. 2.5 / 3 Standard ET-Tubus max. 6,5 mm I.D.
Gr. 4 / 5 Standard ET-Tubus max. 8,0 mm I.D.

4. Optimale Größenordnung

Der iLTS-D ist die ideale Lösung, um in Notfalltaschen und im Airway-Wagen wertvollen Platz zu sparen. Mit nur 2 Größen können alle Patienten ≥ 125 cm schnell und sicher versorgt werden.

Gr. 2.5 / 3 125-155 cm
Gr. 4 / 5 ≥ 155 cm



Bestellhinweis

Intubations-Larynx-Tubus iLTS-D

zum Einmalgebrauch, steril

Größe	Patient	Einzel-Set (1x iLTS-D, 1x Spritze)	10er Set (10x iLTS-D)	Intubations-Set (1x iLTS-D, 1x ET-Tubus mit Stabilisator, 1x Spritze)
2.5 / 3	125-155 cm	4732-08-123-1	4732-08-023-1	4732-08-309-1
4 / 5	≥155 cm	4732-08-145-1	4732-08-045-1	4732-08-209-1

ET Tubus mit Stabilisator

zum Einmalgebrauch, steril

Größe	für iLTS-D Größe	Art.-Nr.	VE
5,5 mm I.D.	2.5 / 3	4731-40-055-1	10
7,5 mm I.D.	4 / 5	4731-40-075-1	10

www.habel-medizintechnik.at