




Nahtfreie Fixation von zentralvenösen Kathetern

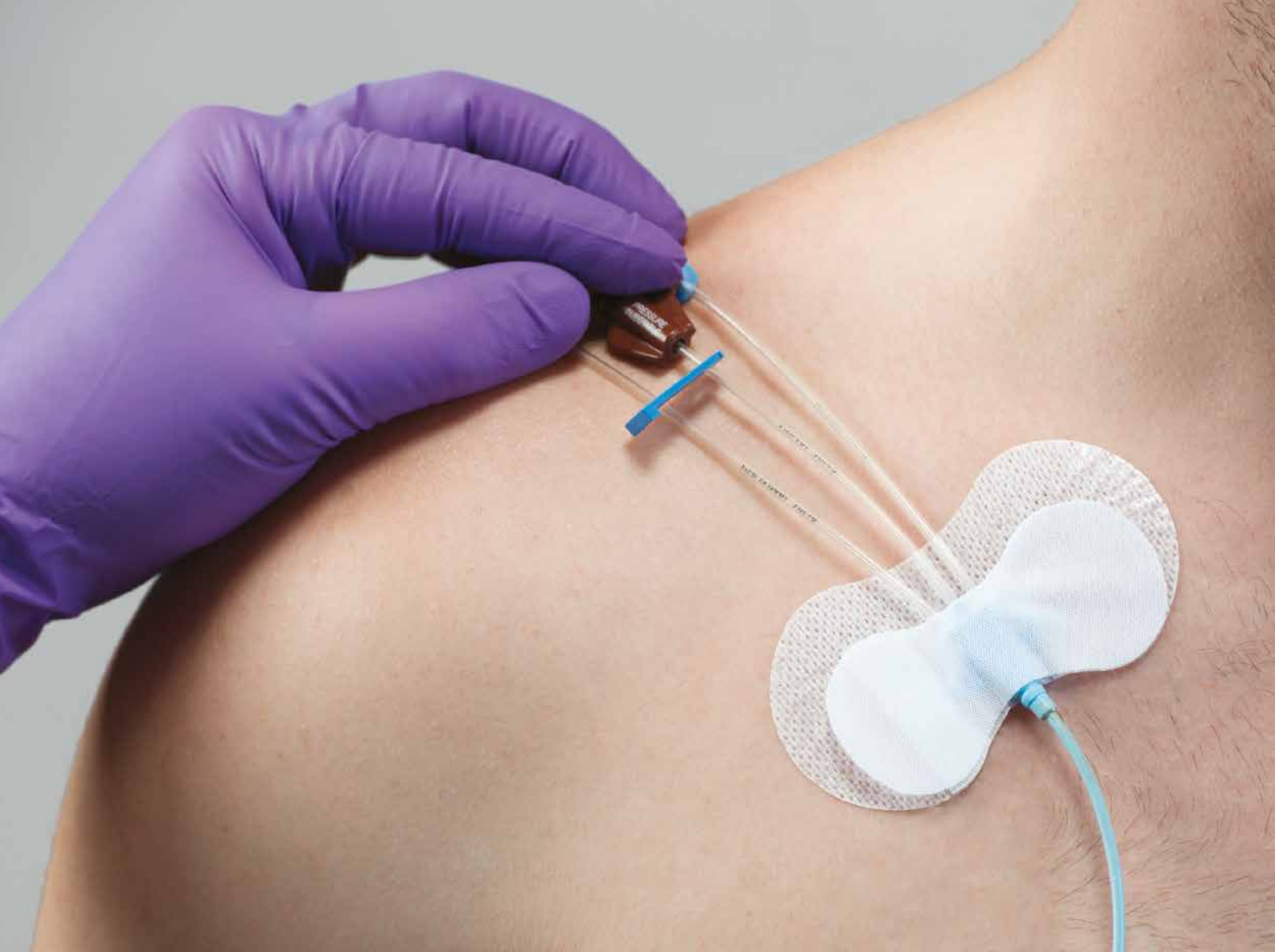

Grip-Lok™ CVC Fixation

kein Annähen des Katheters nötig
latexfrei, hypoallergen und atmungsaktiv

Universal-Fixation für zentralvenöse Katheter

Die universelle Grip-Lok™ CVC Fixation wird auf der Brust oder am Hals sicher angelegt und zur Fixation von CVC-Kathetern eingesetzt. Sie gewährleistet eine stabile und nahtfreie Fixierung an den Befestigungspunkten des Katheters.

- **Einfach:** Auch mit Handschuhen besonders leicht anzuwenden – mühelose Anpassung und Überprüfung von Leitungen, Schläuchen und Kathetern.
- **Sicher:** Bietet maximale Sicherung bei unbeabsichtigter Manipulation am Katheter.
- **Bequem:** Das weiche und flexible Gewebe optimiert den Patientenkomfort.
- **Hypoallergen und latexfrei:** Das hypoallergene, atmungsaktive und latexfreie Material verhindert allergische Reaktionen und Hautirritationen.

Anleitung zum Anbringen der CVC Fixation

Bei einigen Patienten ist eine Hautpräparation oder Haarentfernung für eine bessere Haftung erforderlich. Die Haut muss vor der Anwendung sauber und trocken sein.



1. Schritt

Öffnen Sie die obere Textillasche und ziehen Sie die Schutzfolie innen ab, um die Klebeflächen freizulegen.



2. Schritt

Schieben Sie das Grip-Lok™ so unter den Verteiler, dass dieser mittig auf der freiliegenden Klebefläche liegt.



3. Schritt

Befestigen Sie die obere Lasche über dem Verteiler, indem Sie fest auf die Textilfläche über der Klebefläche sowie um die und zwischen den Zuleitungen drücken.



4. Schritt

Ziehen Sie die Papierfolie unten von der einen und dann der anderen Seite des Grip-Lok™ ab, um es in der gewünschten Position an der Haut zu befestigen.

Bestellhinweis

Artikel	Länge	Art.-Nr.	VE/Stk.
HABEL Grip-Lok™ Universal CVC Fixation	8,9 cm	593601CVC	100