



Nahtlose Fixation von PICC-Kathetern



Grip-Lok™ MWA Fixation

kein Annähen des Katheters nötig
latexfrei, hypoallergen und atmungsaktiv

Universal-Fixation für PICC-Katheter

Die universelle Grip-Lok™ MWA Fixation verfügt über eine Ausnehmung für Katheter-Flügel und wird zur Fixation von PICC-Kathetern eingesetzt. Sie gewährleistet eine stabile und nahtfreie Fixierung an den Befestigungspunkten des Katheters. Das Klettverschluss-Design ermöglicht eine einfache Neupositionierung und den Zugang zum Katheter nach der Fixierung.

- **Einfach:** Auch mit Handschuhen besonders leicht anzuwenden – mühelose Anpassung und Überprüfung von Leitungen, Schläuchen und Kathetern.
- **Sicher:** Bietet maximale Sicherheit bei unbeabsichtigter Manipulation am Katheter.
- **Bequem:** Das weiche und flexible Gewebe optimiert den Patientenkomfort.
- **Hypoallergen und latexfrei:** Das hypoallergene, atmungsaktive und latexfreie Material verhindert allergische Reaktionen und Hautirritationen.

Anleitung zum Anbringen der MWA Fixation

Bei einigen Patienten ist eine Hautpräparation oder Haarentfernung für eine bessere Haftung erforderlich. Die Haut muss vor der Anwendung sauber und trocken sein.



1. Schritt

Öffnen Sie die obere Textiltasche und ziehen Sie die Schutzfolie innen ab, um die Klebeflächen freizulegen. Schieben Sie das Grip-Lok™ so unter den Verteiler, dass dieser mittig auf der freiliegenden Klebefläche liegt.



2. Schritt

Befestigen Sie die obere Lasche über dem Verteiler, indem Sie fest auf die Textilfläche über der Klebefläche sowie um die und zwischen den Zuleitungen drücken.



3. Schritt

Halten Sie das Grip-Lok™ und den Katheter fest und ziehen Sie die Papierfolie unten von der einen und dann der anderen Seite des Grip-Lok™ ab, um es in der gewünschten Position an der Haut zu befestigen.



4. Schritt

Drücken Sie die Kanten und Oberfläche des Grip-Lok™ vorsichtig nach unten, um sicherzustellen, dass sich dieses mit der Haut und dem Katheter verbindet.

Bestellhinweis

Artikel	Größe Katheter-Flügel	Ø Katheter	Art.-Nr.	VE/Stk.
HABEL Grip-Lok™ Universal MWA Fixation	0,45–2,5 cm	16–40 Fr	593300MWA	100