



Sichere Fixation von peripheren Venenkathetern



Grip-Lok™ MIV Fixation

minimiert Zugangskomplikationen
latexfrei, hypoallergen und atmungsaktiv

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Grip-Lok™ Fixation für periphere Venenkatheter

Die Grip-Lok™ MIV Fixation gewährleistet eine stabile Fixierung des peripheren Venenkatheters. Der Einführwinkel wird aufrechterhalten und die Haut des Patienten vor harten Kunststoffteilen geschützt.

- **Einfach:** Auch mit Handschuhen besonders leicht anzuwenden – mühelose Anpassung und Überprüfung von Leitungen, Schläuchen und Kathetern.
- **Sicher:** Bietet maximale Sicherung bei unbeabsichtigter Manipulation am Katheter.
- **Bequem:** Das weiche und flexible Gewebe optimiert den Patientenkomfort.
- **Hypoallergen und latexfrei:** Das hypoallergene, atmungsaktive und latexfreie Material verhindert allergische Reaktionen und Hautirritationen.

Anleitung zum Anbringen der MIV Fixation

Bei einigen Patienten ist eine Hautpräparation oder Haarentfernung für eine bessere Haftung erforderlich. Die Haut muss vor der Anwendung sauber und trocken sein.



1. Schritt

Öffnen Sie das Grip-Lok™-Pflaster und klappen Sie die obere Abziehfolie nach hinten, um den mittleren Teil des Klebestreifens freizulegen.



2. Schritt

Schieben Sie das Grip-Lok™-Pflaster unter den Katheter und den Luer-Anschluss mittig in den freiliegenden Klebebereich.



3. Schritt

Halten Sie das Grip-Lok™-Pflaster und den Katheter in Position und entfernen Sie die umgeklappte Folie.



4. Schritt

Halten Sie das Grip-Lok™-Pflaster in Position und entfernen Sie eine Seite der unteren Abziehfolie. Entfernen Sie dann die andere Seite der unteren Trennschicht und drücken Sie den Klebestreifen sanft an der Haut an.



5. Schritt

Wickeln Sie die obere Klebelasche um den Katheter und drücken Sie diese fest, damit sie sich an die Katheterform anpasst.



6. Schritt

Wickeln Sie die restliche obere Klebelasche um den Luer-Anschluss und drücken Sie diese fest, damit sie sich an die Form des Anschlusses anpasst.

Bestellhinweis

Artikel	Länge	Art.-Nr.	VE/Stk.
HABEL Grip-Lok™ Universal Fixation für periphere IV-Katheter mit und ohne Nahtflügel und Nahtöffnungen und Arterienkatheter mit Nahtflügel	8,9 cm	593300MIV-KIT2	100