



Sichere Fixation von BD Arterienkanülen



Grip-Lok™ MCS Fixation

minimiert Zugangs komplikationen
latexfrei, hypoallergen und atmungsaktiv

Grip-Lok™ Fixation für BD Arterienkanülen mit FloSwitch

Die Grip-Lok™ MCS Fixation gewährleistet eine stabile Fixierung der Arterienkanüle. Die gestanzte Klebefläche passt sich der Form der arteriellen Kanülennabe an und sorgt für optimale Positionierung und zusätzliche Stabilität. Die Fixation ermöglicht einen einfachen Zugang zum FloSwitch.

- **Einfach:** Auch mit Handschuhen besonders leicht anzuwenden – mühelose Anpassung und Überprüfung der Einstichstelle.
- **Sicher:** Bietet maximale Sicherung bei unbeabsichtigter Manipulation an der Kanüle.
- **Bequem:** Das weiche und flexible Gewebe optimiert den Patientenkomfort.
- **Hypoallergen und latexfrei:** Das hypoallergene, atmungsaktive und latexfreie Material verhindert allergische Reaktionen und Hautirritationen.

Anleitung zum Anbringen der MCS Fixation

Bei einigen Patienten ist eine Hautpräparation oder Haarentfernung für eine bessere Haftung erforderlich. Die Haut muss vor der Anwendung sauber und trocken sein.



1. Schritt

Öffnen Sie die obere Lasche und entfernen Sie die Einlage. Halten Sie dabei die obere Lasche geöffnet.



2. Schritt

Schieben Sie das Grip-Lok™ unter die Arterienkanüle und kleben Sie es in der dafür vorgesehenen Aussparung im freiliegenden Klebestreifen fest.



3. Schritt

Halten Sie das Grip-Lok™ in Position und entfernen Sie die Abziehfolie erst von einer und dann von der anderen Seite. Kleben Sie das Grip-Lok™ an der Hautoberfläche fest.



4. Schritt

Kleben Sie die obere Lasche so über der Arterienkanüle fest, dass der FloSwitch® durch den Ausschnitt verläuft.

Bestellhinweis

Artikel	Länge	Art.-Nr.	VE/Stk.
HABEL Grip-Lok™ Fixation für BD Arterienkanülen	8,9 cm	593301MCS-BD	100