



# Die sichere Fixation der arteriellen Kanüle



## **Dale flexible Armschiene**

reduzierte Kanülen-Dislokationen

Handgelenks-Fixation in gewünschter Position

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Der neue Weg zur Sicherung arterieller Leitungen

Die flexibel biegsame Armschiene ermöglicht eine Überstreckung des Handgelenkes bei gleichzeitiger Fixierung des Daumens und gewährleistet so einen optimalen Zugang zur Punktionsstelle.

Die Armschiene kann auf jede gewünschte Position eingestellt und fixiert werden. Das Handgelenk wird dadurch stabilisiert und ungewollte Bewegungen verhindert.

Arterielle Kanülen können somit problemlos gesetzt und sicher an Ort und Stelle fixiert werden. Die Armschiene ist mit besonders weichem Material überzogen und wird mit elastischen, latexfreien Bändern mit Klettverschlüssen schnell und einfach befestigt.




## Eigenschaften und Vorteile

- **Schneller und einfacher Arterienzugang** durch Überstreckung des Handgelenks
- **Einfache Handhabung** durch „All-in-One“-System ohne zusätzliche Pflaster und Verbände. Klettverschlüsse ermöglichen die einfache und rasche Fixierung
- **Weniger Druckstellen** durch besonders weiche Polsterung und hautfreundliches Material
- **Latexfrei**
- **MR-tauglich (3 Tesla)**

## Einfache Handhabung in 2 Schritten



1. Überstrecken Sie das Handgelenk des Patienten und positionieren Sie die Armschiene. Biegen Sie die Armschiene in die gewünschte Position.

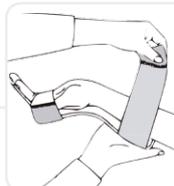

2. Befestigen Sie die elastischen Bänder mit leichtem Zug um Hand bzw. Arm und fixieren Sie diese mit den Klettverschlüssen.

## Bestellhinweis

Artikel	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.	
HABEL Dale flexible Armschiene	groß	22,5 x 9,5 cm	52650	20
	mittel	13 x 6,5 cm	52651	20
	klein	10,5 x 5,5 cm	52652	20
	extra klein	10,6 x 2,5 cm	52653	20