



Sicherer Halt für nasale Sonden



Naso-gastraler Sondenhalter

keine Hautreizungen
schnelle & einfache Handhabung


HABEL
MEDIZINTECHNIK

Naso-gastraler Sondenhalter

Der naso-gastrale Sondenhalter wird zum Fixieren von Ernährungs- und Aspirationssonden verwendet, wie z. B. für Salem-Gastroduodenalsonden, Levin-Magensonden, sowie naso-enterale Ernährungssonden oder nasogastrale Darmsonden und ermöglicht die gleichzeitige Fixation von zwei Sonden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Keine Hautreizungen**
Durch die hautfreundliche Klebefläche werden Läsionen oder Nekrosen der Haut vermieden. Die hautfreundliche Klebefläche gewährleistet sicheren Halt auch über einen längeren Zeitraum und ist trotzdem leicht zu entfernen.
- **Sicherheit und einfache Handhabung**
Einzigartige, ineinander greifende Laschen wickeln sich spiralförmig um die naso-gastrale Sonde und sorgen so für eine optimale Sicherheit der Sonde. Nicht haftende Kunststoffspitzen an den Enden der beiden Laschen machen das Auspacken und Entfernen der Sonde sicherer und einfacher, auch mit Handschuhen.
- **Erhöhter Patienten-Komfort**
Unbeabsichtigtes Herausziehen der Sonde wird vermieden.
- **Latexfrei**

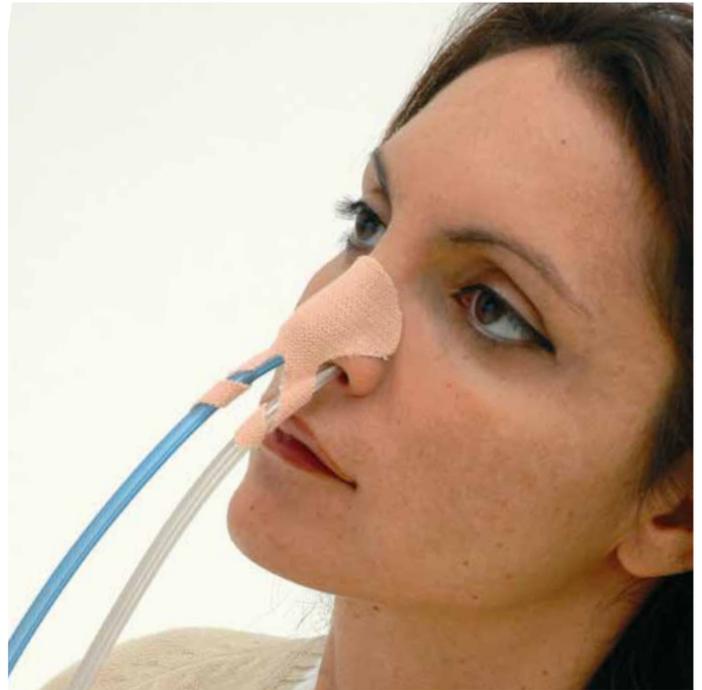


Einfache Handhabung

Nach Intubation den Schlauch sowie die Nase des Patienten mit einem alkoholgetränkten Tuch reinigen.

Den Halter – am Nasenpolster beginnend – vollständig von der Schutzfolie abziehen.

Das Nasenpolster auf der Nase anbringen.

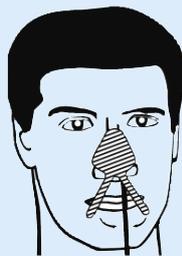

Die dem Schlauch am nächsten liegende Lasche spiralförmig fest um den Schlauch wickeln. Die andere Lasche auf gleiche Weise spiralförmig um den Schlauch wickeln.



Zum Entfernen: Einfach die nicht haftenden Spitzen greifen und die Laschen vom Schlauch abwickeln.

Bestellhinweis

Artikel	Größe	Art.-Nr.	VE/Stk.
Naso-gastraler Sondenhalter	85,7 x 60,3 mm	52160	50
Naso-gastraler Sondenhalter klein	79,3 x 41,2 mm	52161	50