



# EverFLO Sauerstoffkonzentrator

## Kurzanleitung

Dieses Dokument ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers.  
Vollständige Informationen finden Sie in der originalen Philips Gebrauchsanweisung.

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# EverFLO Inbetriebnahme

1

Verbinden Sie den Befeuchter-Anschluss-schlauch mit dem Befeuchterbecher und dem metallenen Sauerstoffauslass.

2


Verbinden Sie Ihren Verlängerungs-schlauch bzw. Nasenbrille mit dem Befeuchterbecher.

4

Drehen Sie den Sauerstoff-Einstellungsknopf bis die Kugel auf der von Ihrem Arzt verordneten Sauerstoffabgabe (0,5 bis 5 Liter pro Minute) liegt.

3

Stecken Sie den EverFLO an den Strom und schalten Sie Ihr Gerät ein.

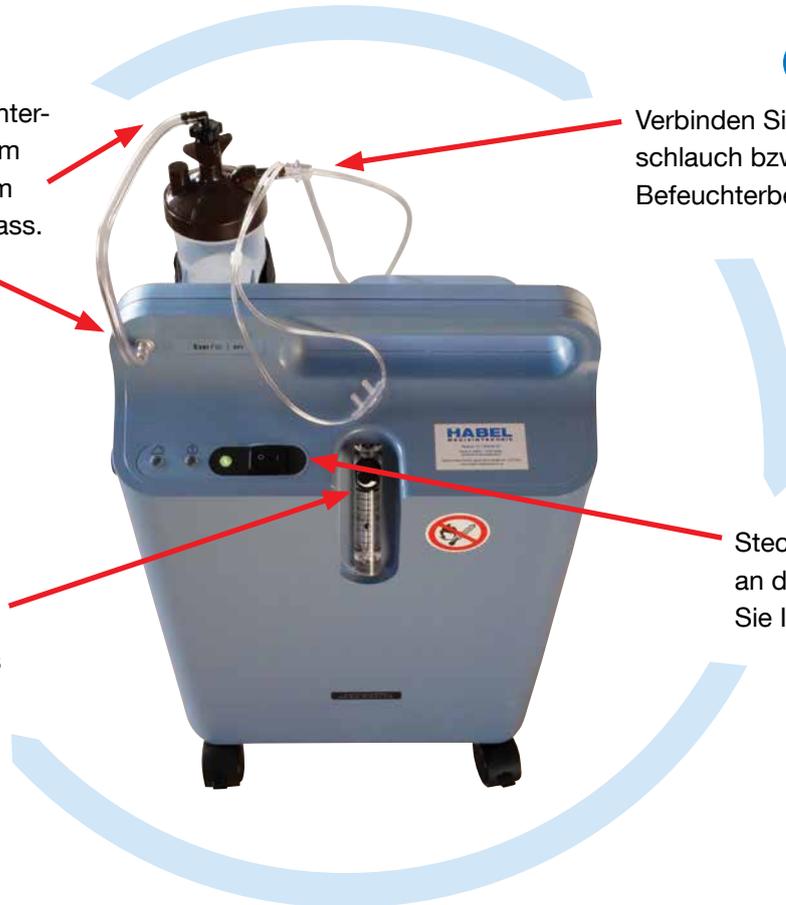

## Alarmmeldungen

## Mögliche Ursache / Fehlerbehebung

Nur akustischer Alarm

### Keine Stromzufuhr:

Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist oder ob es einen Stromausfall gibt.



### Geringe Sauerstoffkonzentration:

Sie können das Gerät weiter verwenden – kontaktieren Sie jedoch unseren technischen Kundendienst.



### Möglicher Gerätefehler:

Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 5 Minuten und schalten Sie das Gerät wieder ein. Bleibt der Zustand unverändert, nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst.



### Gerätedefekt:

Schalten Sie das Gerät aus. Nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst.



blinkend

### Zubehör-Fehler:

Die häufigste Ursache ist ein abgeknickter Schlauch oder ein verkalkter Befeuchterbecher: lesen Sie dazu bitte die Beschreibung auf den folgenden Seiten.

Bitte beachten Sie, dass diese Kurzanleitung die Gebrauchsanweisung nicht ersetzt.

# Alarmmeldung: Zubehör-Fehler

Die häufigste Ursache ist ein abgeknickter Schlauch (überprüfen Sie bitte den Verlängerungsschlauch) oder ein verkalkter Befeuchterbecher.



Alarmanzeige: Rot blinkend /  
gelb und grün dauerhaft leuchtend

## Wie Sie feststellen, ob der Befeuchter verkalkt ist

- 1 Lassen Sie den EverFLO eingeschaltet
- 2 Ziehen Sie den Befeuchter-Anschlusschlauch vom Metalladapter ab und warten Sie 1 Minute.
- 3 **Wenn der Alarm verstummt** und die Lampen aufhören zu leuchten, funktioniert Ihr Konzentrator ordnungsgemäß und es ist **höchstwahrscheinlich** der Befeuchter sowie der **innen liegende Schlauch verkalkt**.



**Wenn der Alarm weiterhin ertönt**, liegt ein technischer Fehler vor.  
Bitte kontaktieren Sie uns.

## Wie Sie den Fehler beheben



1

Ersetzen Sie den verkalkten Befeuchter durch den mitgelieferten, sauberen Ersatzbefeuchter.



2

Schrauben Sie dazu den Befeuchter-Anschlussschlauch vom Deckel des verkalkten Befeuchterbechers ab und verbinden Sie ihn mit dem Deckel des sauberen Ersatzbefeuchters.



3

Geben Sie den sauberen Befeuchterbecher wieder in die Halterung des EverFLOs und verbinden Sie den Anschlussschlauch mit dem Metalladapter. Ihr Gerät ist wieder einsatzbereit.

**TIPP:** Um ein Verkalken des Befeuchterbechers zu vermeiden, **verwenden Sie bitte medizinisches, destilliertes Wasser.**


**ACHTUNG!** Entkalken und säubern Sie unbedingt Ihren bisher verwendeten Befeuchterbecher!

# Pflege und Reinigung

Da das Gerät Umgebungsluft einsaugt sind die Lüftungsschlitze 1 x im Monat zu reinigen.

## Wie Sie die Lüftungsschlitze reinigen


- 1 Entfernen Sie hierfür den Deckel wie abgebildet.
- 2 Reinigen Sie die unteren und oberen Lüftungsschlitze mit einem Staubsauger und wischen Sie diese danach mit einem feuchten Tuch ab.

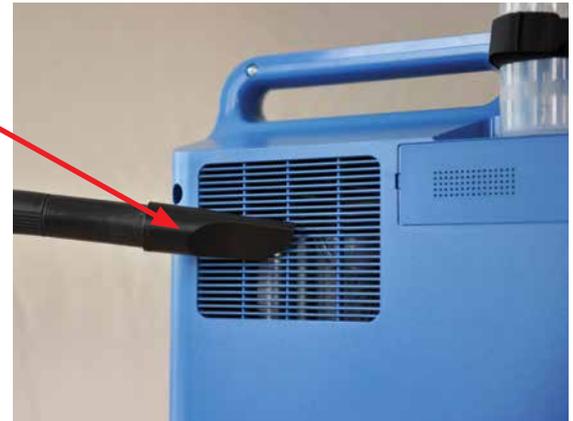

### Information zum Filter

Sie erhalten von uns automatisch und rechtzeitig Ihren neuen Filter, samt Anleitung zum Wechseln.

## Wie Sie den bisher verwendeten Befeuchterbecher entkalken

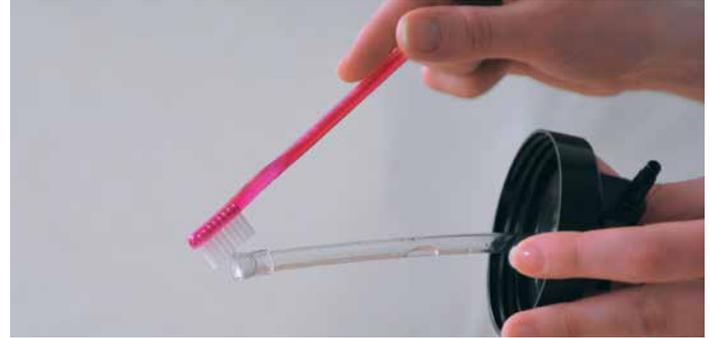

1

**Füllen Sie den Becher mit einem Essig-Wasser-Gemisch im Verhältnis 1:1 bis zur Hälfte auf.** Schrauben Sie den braunen Deckel mit innen liegendem Schlauch wieder an und **lassen Sie das Essig-Wasser-Gemisch einige Stunden einwirken.**

2

Nachdem das Gemisch einwirken konnte, **reinigen Sie die Öffnungen** am Ende des innen liegenden Befeuchterschlauches **vorsichtig mit einer Zahnbürste.**

3

Spülen Sie den Becher, Befeuchter-Anschlussschlauch und Deckel gründlich mit kaltem Wasser aus. – Fertig!

# HABEL Homecare

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen. Wir sind österreichweit für Sie da und haben über 45 Jahre Erfahrung im Homecare-Bereich.



## Schlafapnoe-Therapie

für erholsamen Schlaf  
und erhöhte Lebensqualität



## Sauerstoff-Therapie

für maximale  
Mobilität und mehr  
Spontanität



## Heimbeatmung

für kontinuierliche  
Atemunterstützung  
zu Hause



## Sekretmanagement

neue Wege für die  
nicht-invasive Sekretmobilisation



## Ambulante Schmerztherapie

für mehr Mobilität  
und größtmögliche  
Sicherheit

## Kontaktinformation



Ignaz-Köck-Straße 20  
1210 Wien



[homecare@habel-medizintechnik.at](mailto:homecare@habel-medizintechnik.at)



Zubehör, Nachbestellungen  
und Krankenkassenabwicklung  
01/292 66 42 – 155



Mo. – Do. 08:00 bis 16:30  
Fr. 08:00 bis 14:30



[www.habel-medizintechnik.at](http://www.habel-medizintechnik.at)  
[www.habel-shop.at](http://www.habel-shop.at)



Technische Fragen  
01/292 66 42 – 188

Händler Österreich

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK