

# Sedaconda ACD Equipment und Wechselintervalle



## Sedaconda ACD-S & Sedaconda ACD-L

- Nur an einem Patienten verwenden
- Wechsel täglich nach 24 h




## Sedaconda ACD Spritze

- Für Sevofluran/Isofluran
- Wechsel nach vollständiger Entleerung bzw. bei neuem Patienten




## Fülladapter (Einweg & wiederverwendbar)

- Für Sevofluran/Isofluran, Sedaconda-Isofluran, Sevofluran QuikFil & Baxter Safe-T-Seal
- Einweg: Entsorgung Adapter inkl. Flasche nach 2 Wochen

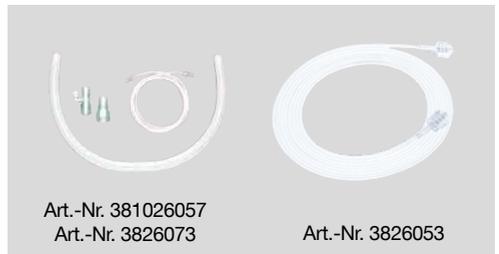

## Schlauch zum Restgasfilter und CO<sub>2</sub>/Gas-Messleitung

- Wechsel bei neuem Patienten (381026057 & 3826073)
- Wechsel täglich nach 24 h (3826053)

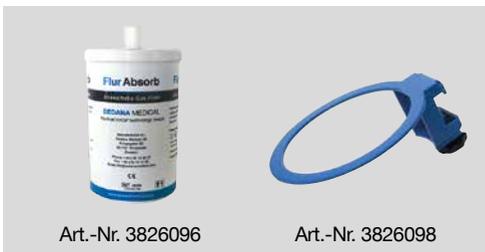

## FlurAbsorb-Restgasfiltersystem\*

- Nach Wischdesinfektion an mehreren Patienten verwendbar
- Fassungsvermögen 500 ml/400 g Anästhesiewirkstoff (2 Flaschen oder 10 Spritzen à 50 ml)



## FlurAbsorb-S Restgasfiltersystem\*

- Nur an einem Patienten verwenden
- Wechsel nach 24 h oder nach 150 ml Anästhesiewirkstoff (3 Spritzen à 50 ml)

\* FlurAbsorb ist getestet und freigegeben für den Einsatz mit Sedaconda

# Reinigung/Desinfektion des Fülladapters REF 26042 & 26044

## Routinemäßige Reinigung:

Die routinemäßige Reinigung oder Reinigung zwischen den einzelnen Verwendungen wird durch Abwischen des Adapters von außen mit einem mit 70 % Isopropylalkohol getränkten Stofftuch (fusselfrei) durchgeführt. Danach muss 10 Minuten gewartet werden, bis das Produkt abgetrocknet ist. Danach wird die Sauberkeit kontrolliert. Es muss sicher gestellt werden, dass der komplette Alkohol verdunstet ist, bevor das Produkt erneut verwendet wird.

## Ablagerungen oder Kontaminierung am Produkt:

Das Produkt wird mit einer kleinen Bürste mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel gewaschen und gereinigt. Danach wird das Produkt mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel stark gespült. Zuletzt wird das Produkt mit warmem Wasser sehr gründlich abgespült und das Wasser abgeschüttelt.

Das Produkt wird in eine Lösung aus 70 % Isopropylalkohol für 5 Minuten eingelegt. Danach wird das Produkt aus der Lösung entnommen, abgeschüttelt und für Minimum 3 Stunden an einem reinen Ort zum Trocknen abgelegt. Danach wird sich über die Sauberkeit versichert und sichergestellt, dass der gesamte Alkohol abgetrocknet ist.

## Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie immer 70 % Isopropylalkohol gemäß Herstellerangaben.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, um den Adapter zu reinigen.
- Erhitzen Sie den Adapter nicht, legen diesen nicht in einen Sterilisator oder trocknen diesen über 25°C.
- Sollten Sie der Meinung sein, der Innenbereich des Adapters ist kontaminiert, verwenden Sie den Adapter nicht weiter.
- Sollte der Adapter beschädigt oder die Dichtung gebrochen sein, verwenden Sie den Adapter nicht weiter.