



Inogen At Home Sauerstoffkonzentrator

Kurzanleitung

Dieses Dokument ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
Vollständige Informationen finden Sie in der originalen Inogen Gebrauchsanweisung.

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Inbetriebnahme

Schritt 1

MIT Befeuchterbecher:

Verbinden Sie den Befeuchter-Anschlusschlauch mit dem Befeuchterbecher und dem Ansatzstück. Verbinden Sie Ihren Verlängerungsschlauch bzw. Ihre Nasenbrille mit dem Befeuchterbecher.



OHNE Befeuchterbecher:

Schließen Sie Ihren Verlängerungsschlauch bzw. Ihre Nasenbrille an das Ansatzstück an. Das Ansatzstück befindet sich oben am Konzentrator.



Schritt 2

Stecken Sie den Inogen At Home an den Strom und schalten Sie ihn mittels Ein-/Aus-Taste ein.



Schritt 3

Drücken Sie die Plus- oder Minus-taste, um das Gerät auf die von Ihrem Arzt verordnete Sauerstoffabgabe einzustellen.




Alarmmeldungen

Mögliche Ursache / Fehlerbehebung

Nur akustischer Alarm


Keine Stromzufuhr:

Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist oder ob es einen Stromausfall gibt.

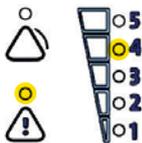

Geringe Sauerstoffkonzentration:

Sie können das Gerät weiter verwenden – kontaktieren Sie jedoch unseren technischen Kundendienst oder Ihr betreuendes Atemzentrum.

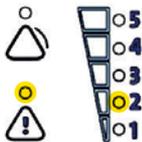

Möglicher Gerätefehler:

Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 5 Minuten und schalten Sie das Gerät wieder ein. Bleibt der Zustand unverändert, nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst.


blinkend



Gerätedefekt:

Schalten Sie das Gerät aus. Nutzen Sie eine alternative Sauerstoffquelle und kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst.

blinkend

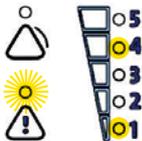


Zubehör-Fehler:

Die häufigste Ursache ist ein abgeknickter Schlauch oder ein verkalkter Befeuchterbecher: lesen Sie dazu bitte die Beschreibung auf den folgenden Seiten.

Sie finden weitere Alarmmeldungen in der Gebrauchsanweisung auf den Seiten 9–10.

Alarmmeldung: Zubehör-Fehler

Die häufigste Ursache ist ein abgeknickter Schlauch (überprüfen Sie bitte den Verlängerungsschlauch) oder ein verkalkter Befeuchterbecher.

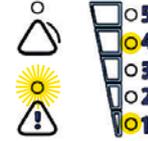

Alarmanzeige:
gelb blinkend
Stufe 1 & 4:
dauerhaft leuchtend

Wie Sie feststellen, ob der Befeuchter verkalkt ist

- 1 Lassen Sie den Inogen At Home eingeschaltet.
- 2 Ziehen Sie den Befeuchter-Anschlusschlauch vom Metalladapter ab und warten Sie 1 Minute.
- 3 **Wenn der Alarm verstummt** und die Lampen aufhören zu leuchten, funktioniert Ihr Konzentrator ordnungsgemäß und es ist **höchstwahrscheinlich** der Befeuchter sowie der **innen liegende Schlauch verkalkt**.



Wenn der Alarm weiterhin ertönt, liegt ein technischer Fehler vor. Bitte kontaktieren Sie uns.

Wie Sie den Fehler beheben



1

Ersetzen Sie den verkalkten Befeuchterbecher durch den mitgelieferten, sauberen Ersatzbecher.



2

Schrauben Sie dazu den Befeuchter-Anschlusschlauch vom Deckel des verkalkten Befeuchterbechers ab und verbinden Sie ihn mit dem Deckel des sauberen Ersatzbechers.



3

Geben Sie den sauberen Befeuchterbecher wieder in die Halterung des Inogen At Home und verbinden Sie den Anschlusschlauch mit dem Metalladapter. Ihr Gerät ist wieder einsatzbereit.

TIPP: Um ein Verkalken des Befeuchterbechers zu vermeiden, **verwenden Sie bitte medizinisches, destilliertes Wasser.**

ACHTUNG! Entkalken und säubern Sie unbedingt Ihren bisher verwendeten Befeuchterbecher!

Pflege und Reinigung

Da das Gerät Umgebungsluft einsaugt, sind die **Lüftungsschlitze** **1x pro Monat** und der **Partikelfilter 1x pro Woche** zu reinigen.


Wie Sie die Lüftungsschlitze reinigen

- 1 Reinigen Sie die Lüftungsschlitze mit einem Staubsauger und wischen Sie diese danach mit einem feuchten Tuch ab.



Wie Sie den Partikelfilter reinigen

- 1 Entfernen Sie den Filter auf der rechten Seite des Geräts.
- 2 Reinigen Sie diesen mit einem milden Flüssigwaschmittel und Wasser, spülen Sie mit Wasser nach und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Filter vor dem Wiedereinsetzen in den Konzentrator vollständig trocken ist.

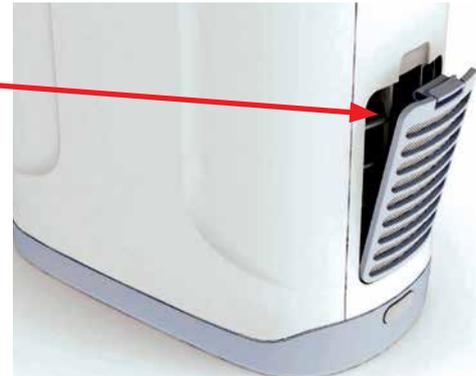

Informationen zum Lufteinlassfilter

Sie erhalten von uns automatisch und rechtzeitig Ihren neuen Filter, samt Anleitung zum Wechseln.

Wie Sie den bisher verwendeten Befeuchterbecher entkalken



1

Füllen Sie den Becher mit einem Essig-Wasser-Gemisch im Verhältnis 1:1 bis zur Hälfte auf. Schrauben Sie den braunen Deckel mit innen liegendem Schlauch wieder an und **lassen Sie das Essig-Wasser-Gemisch einige Stunden einwirken.**

2

Nachdem das Gemisch einwirken konnte, **reinigen Sie die Öffnungen** am Ende des innen liegenden Befeuchterschlauches **vorsichtig mit einer Zahnbürste.**

3

Spülen Sie den Becher, Befeuchter-Anschlussschlauch und Deckel gründlich mit kaltem Wasser aus. – Fertig!

HABEL Homecare

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen. Wir sind österreichweit für Sie da und haben über 45 Jahre Erfahrung im Homecare-Bereich.



Schlafapnoe-Therapie

für erholsamen Schlaf
und erhöhte Lebensqualität



Sauerstoff-Therapie

für maximale
Mobilität und mehr
Spontanität



Heimbeatmung

für kontinuierliche
Atemunterstützung
zu Hause



Sekretmanagement

neue Wege für die
nicht-invasive Sekretmobilisation



Ambulante Schmerztherapie

für mehr Mobilität
und größtmögliche
Sicherheit

Kontaktinformation



Ignaz-Köck-Straße 20
1210 Wien



homecare@habel-medizintechnik.at



Zubehör, Nachbestellungen
und Krankenkassenabwicklung
01/292 66 42 DW 155



Mo. – Do. 08:00 bis 16:30
Fr. 08:00 bis 14:30



www.habel-medizintechnik.at
www.habel-shop.at



Technische Fragen
01/292 66 42 DW 188

Händler Österreich

HABEL
MEDIZINTECHNIK