

24h-Mundhygiene Checkliste

BALLARD Mundhygiene-Set Medium



Die Mundhygiene sollte nach einem einheitlichen Standard und protokolliert erfolgen.

Bei Patienten mit Bewusstseinsstörungen oder somnolenten Patienten sollte ein Beisskeil eingesetzt werden.

Name des Patienten: _____

Name der Pflegekraft: _____

Benutzte Lösungen: _____

Beginn des 24 Stunden Zeitraums: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Schritt 1:

☐

PREP-Packung öffnen (enthält Yankauer)

Sekrete aus der Mundhöhle mit dem Yankauer absaugen

☐

ZAHNBÜRSTE, Packung öffnen

Zähne putzen mit Zahnbürste und Lösung

- Mundhöhle mit Hilfe des Applikator-Tupfers befeuchten

Schritt 1 Uhrzeit / Initialen

Schritt 2: _____ Stunden später

☐

Sekrete aus der Mundhöhle mit dem Yankauer absaugen

☐

SAUGTUPFER, Packung öffnen

Mund und Zunge mit Saugtupfer und Lösung reinigen

- Mundhöhle mit Hilfe des Applikator-Tupfers befeuchten

Schritt 2 Uhrzeit / Initialen

Schritt 3: _____ Stunden später

☐

Sekrete aus der Mundhöhle mit dem Yankauer absaugen

☐

SAUGTUPFER, Packung öffnen

Mund und Zunge mit Saugtupfer und Lösung reinigen

- Mundhöhle mit Hilfe des Applikator-Tupfers befeuchten

Schritt 3 Uhrzeit / Initialen

Öffnen Sie nach dieser 24 Stunden Periode ein neues Set, um den Mundhygieneprozess neu zu starten.

Das BALLARD Mundhygiene-Set Medium dient zur Durchführung einer täglichen Mundhygiene mit protokolliertem Verlauf.

