



Kombiniertes Design von Stylet und Bougie



Universal Stylet Bougie (USB)

Stylet und Bougie in einem
sicheres Einführen & Entfernen

Hybrid aus Stylet und Bougie

Der Universal Stylet Bougie (USB) besteht aus zwei Metalleinsätzen und einem flexiblen Mittelteil. Dadurch ist er bei der Verwendung als Stylet starr genug, um den Trachealtubus in eine Vielzahl von Positionen zu biegen und bei der Verwendung als Bougie gleichzeitig so flexibel und formbar, dass beim Einführen in die Trachea ein Widerstand der Knorpelspangen zu spüren ist und der Trachealtubus korrekt platziert werden kann.

Einzigartiges Design


Aufgrund der sechseckigen Form hat der USB weniger Kontakt und Reibung mit der Innenseite des Trachealtubus und kann einfach eingeführt und wieder entfernt werden. Er bietet optimalen Halt und reduziert das Risiko des „Wegrollens“. Durch den flexiblen Abschnitt zwischen zwei Metalleinsätzen bietet der USB ein höheres Maß an Verstärkung und eine bessere Erkennung der Knorpelspangen in der Trachea, als bei herkömmlichen Bougies.

Mit den zwei Metalleinsätzen, die gebogen werden können, kann der USB einfach in den gewünschten Winkel ausgerichtet werden. Punkte zeigen an, wo sich die Metalleinsätze befinden.



Reibungsarme sechseckige Form

für optimales Einsetzen und Entfernen

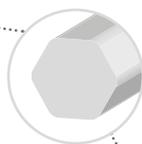

Abgeflachtes Ende (nicht patientenseitig)

ermöglicht es dem Anwender, das Ende des USB in den Tubus-Konnektor zu stecken, um ihn in Position zu halten

Gebogene Spitze (Coudé)

um das Einführen zu optimieren; atraumatisch, um den USB sicher einführen zu können

Metalleinsätze und mechanische Verstärkung

die Punkte kennzeichnen die Abschnitte mit einem Metalleinsatz, die eine Anpassung des USB an den gewünschten Winkel ermöglichen und in Kombination mit dem flexiblen Mittelteil ein verbessertes Feedback der Knorpelspangen in der Trachea bieten



Längenmarkierungen

Bestimmung der Länge bei 35, 20 und 12 cm von der Spitze des Patientenendes des USB aus, um eine korrekte Positionierung zu gewährleisten



Ideal für den Einsatz in Rettungsdienst und Klinik

Der USB kann sowohl in der präklinischen als auch in der stationären Umgebung verwendet werden. In der präklinischen Umgebung lässt er sich dank des gefalteten Designs und des kleineren Volumens leicht in Rettungswagen und Notfallrucksäcken oder -sets verstauen, ohne dass seine Funktion oder Form beeinträchtigt wird. Das hybride Design von Bougie und Stylet erübrigt außerdem das Mitführen zweier separater Produkte.

Verwendung als Stylet

- Die sechseckige Form reduziert den Kontakt mit dem Trachealtubus und erleichtert somit das Entfernen des USB aus dem Tubus, sobald die korrekte Platzierung erfolgt ist.
- Durch den flexiblen Abschnitt zwischen zwei Metalleinsätzen ist das gesamte Produkt weniger starr als viele andere Stylets, was die Gefahr von Traumata verringert.



Gerade bis zum Cuff:





Gebogen:



Verwendung als Bougie

- Die erhöhte Verstärkung sorgt für eine bessere taktile Erkennung der Trachea-Spangen.
- Die sechseckige Form und das gefaltete Design bieten eine kontinuierliche Kontrolle der Position.
- Das proximale Ende des USB kann im Konnektor des Endotrachealtubus eingesteckt werden, um ein versehentliches Verschieben bis zu dem Punkt zu verhindern, an dem der Trachealtubus über den USB geschoben werden soll.
- Kann in verschiedenen Varianten verwendet werden, was eine flexible Nutzung ermöglicht und die Möglichkeit bietet, das Produkt ohne Assistenz zu verwenden.

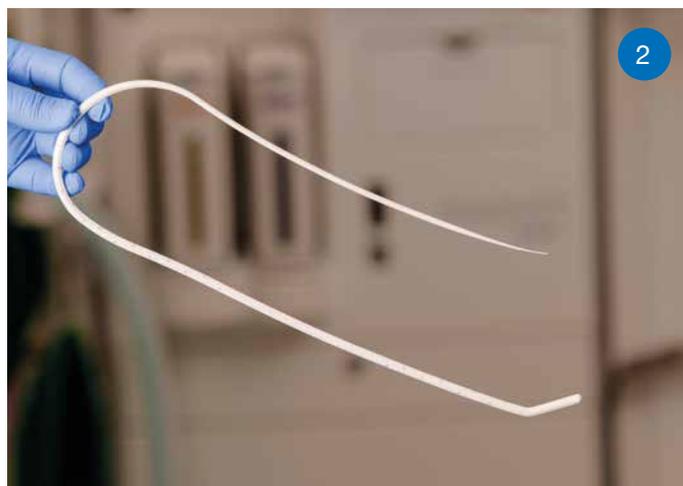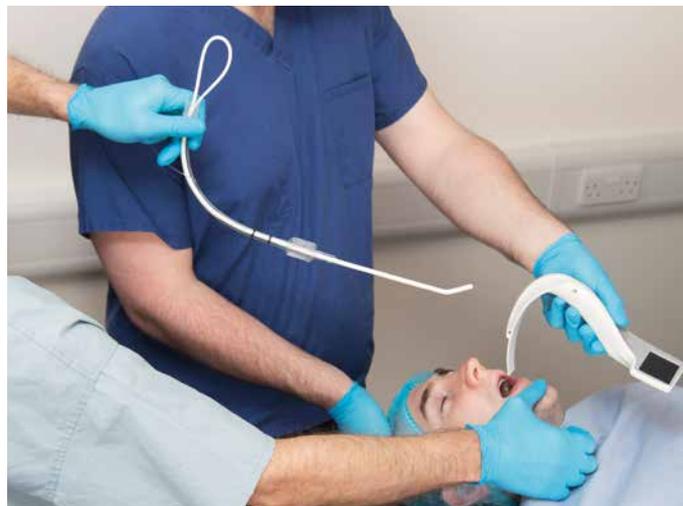

- 1) Als Standard-Bougie.
- 2) Wie ein Standard-Bougie, aber in der Ausgangsform des USB. Der Anwender kann den USB in dieser Form einführen, um die Richtung beizubehalten, und dann den Tubus über den USB schieben, sobald er richtig positioniert ist.
- 3) Der Trachealtubus kann über den USB so vorgeschoben werden, dass sich die Spitze des Tubus an der Stelle befindet, an der der zweite Metallabschnitt beginnt (gekennzeichnet durch die Punkte). Das proximale Ende wird dann in den Trachealtubus zurückgeklappt, damit sich der Tubus nicht versehentlich bewegt. Sobald der Bougie korrekt positioniert ist, wird der Trachealtubus wie gewohnt über den USB geschoben.

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
Universal Stylet Bougie (USB)	378090-015	10