

# AMG-06 Gasmonitor

## Kurzanleitung

Ziel dieser AMG-06-Kurzanleitung ist es, Sie durch einige der wichtigsten Schritte zu führen, um sich mit dem Starten, der Einrichtung und der Implementierung des AMG-06-Monitors vertraut zu machen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

### Schritt 1 – Inbetriebnahme

- Der AMG-06 verfügt über eine Klemme, mit der er auf eine vertikale oder eine horizontale Schiene gesetzt werden kann. Ziehen Sie die Klemme einfach an der gewünschten Schiene fest, bis das Gerät stabil positioniert ist.
- Platzieren Sie die Wasserfalle an der Seite des Geräts. Sie hören ein „Klicken“, sobald diese eingerastet ist. Sie können den Monitor nun durch Drücken der weißen Taste in der Mitte des Monitors einschalten.



### Schritt 2 – Wirkstoff- und Einheiten-Einstellung

- Navigieren Sie zum Tab für Einstellungen, sobald der Monitor eingeschaltet ist, und wählen Sie den gewünschten Wirkstoff und die Einheiten aus, die angezeigt werden sollen.
- In diesem Bereich können Sie für den Monitor auch Alarmgrenzen für Anästhetika und Kohlendioxid einstellen.



### Schritt 3 – Alarm-Einstellungen

- Berühren Sie auf dem Bildschirm einfach den gewünschten Wert, um die Alarmeinstellungen für den ausgewählten Wert zu öffnen.
- Setzen Sie eine Ober- und Untergrenze und drücken Sie auf „schließen“, um den Alarm zu speichern und zu aktivieren.



### Schritt 4 – Erweiterte Einstellungen

- Über den Bildschirm für „Erweiterte Einstellungen“ können Sie auf Patientendaten und Spracheinstellungen zugreifen.



### Schritt 5 – Reinigung und Desinfektion

- Der Monitor kann zwischen den Einsätzen mit Reinigungs- oder Desinfektionslösung auf einem geeigneten Tuch gereinigt werden. Empfohlene Wirkstoffe sind:  
0,5 % ionische Oberflächenlösung und 70 % Isopropanol.



## **Distributor**

Sedana Medical AB (publ)  
Vendevägen 89 | SE-182 32 Danderyd | Sweden  
Phone: +46 (0)8 124 05 200  
[www.sedanamedical.com](http://www.sedanamedical.com) | [info@sedanamedical.com](mailto:info@sedanamedical.com)

## **Manufacturer**

Triton Electronic Systems Ltd.  
Sibirsky Tract 12/5 | Ekaterinburg | Russia, 620100  
+7 (343) 304-60-50, +7 (343) 304-60-57  
[www.trea-on.com](http://www.trea-on.com) | [info@treat-on.com](mailto:info@treat-on.com)

**For questions, please contact [info@sedanamedical.com](mailto:info@sedanamedical.com)**