



Philips DreamStation 2

Kurzanleitung

Dieses Dokument ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
Vollständige Informationen finden Sie in der originalen Philips Gebrauchsanweisung.

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Zusammensetzen der DreamStation 2 mit Warmluftbefeuchter



Stromversorgung

Das Netzkabel kann in beide Richtungen geführt werden. Ein weißer Leuchtring gibt die Stromversorgung an.



Entfernen des Befeuchterwassertanks

Drücken Sie die Kerbe auf dem Deckel, um den Tank zu lösen. Schieben Sie den Tank von der Heizplatte.



Entfernen des Deckels und Füllen des Tanks mit Wasser

Heben Sie den Ring am Deckel an und ziehen Sie ihn nach oben.



Wiederanbringen des Tanks

Richten Sie den Haken am Deckel an den Laschen des Tanks aus und lassen Sie sie einrasten. Schieben Sie den Tank auf einer flachen Oberfläche auf die Heizplatte, bis es klickt.



Anbringen & Abnehmen des Schlauches

Stecken Sie den Schlauch auf die Luftauslassöffnung. Knicken Sie beim Abnehmen den Gummi-Anschluss leicht ab, um den Schlauch sanft vom Luftauslass zu lösen.



Drücken Sie auf die Therapietaste, um zu beginnen

Ein blauer Leuchtring deutet darauf hin, dass die Therapie läuft.

Therapie starten

- Drücken Sie die „EIN/AUS Taste“, um die Therapie zu starten.

Ein blauer Ring zeigt an, dass die Therapie läuft.

Anpassungen der 2 Komforteinstellungen

- Rampenfunktion
- Befeuchtereinstellung des Warmluftbefeuchters

Tippen Sie auf die Symbole, um Einstellungen vorzunehmen

Filterfach & Speicherkarte

Lufteinlass

Steckplatz für SD-Karte

Filterfach mit Lasche zum Ziehen



Rampenfunktion (optional – vom Schlaflabor verordnet)

Die Rampenfunktion kann das Einschlafen erleichtern. Wenn die Rampe aktiviert wurde, startet das Gerät mit einem niedrigeren Druck und erhöht diesen schrittweise bis der eingestellte Therapiedruck erreicht ist. Diese Funktion kann sowohl am Beginn als auch während der Nacht aktiviert werden. Bei auftretenden Ereignissen wie Apnoen oder Hypopnoen wird der Druck automatisch entsprechend des Bedarfs erhöht.


Der Rampen-Anfangsdruck wird für einen bestimmten Zeitraum (15 min/standardmäßig, 30 min oder 45 min) konstant abgegeben. Sie haben die Möglichkeit den Rampen-Anfangsdruck auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzustellen.

Rampen-Einstellungen

- 1 Drücken Sie auf die Therapietaste, um die Therapie zu beginnen.
- 2 Tippen Sie auf das Rampensymbol, um den Rampendruck anzuzeigen und einzustellen.
- 3 Der Rampendruck kann von 4 bis 10 cm H₂O gewählt oder auf AUS gestellt werden. Tippen Sie hierzu auf die Symbole „+“ oder „-“, bis Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben.
- 4 Tippen Sie auf „Bestätigen“, um die Einstellung zu speichern.

Während der Therapie, können Sie ablesen, welcher Druck abgegeben wird:

- Ein **durchgehender Ring** zeigt an, dass der **verordnete Therapiedruck** abgegeben wird.
- Ein **gepunkteter Ring** zeigt an, dass der **Rampendruck** abgegeben wird.

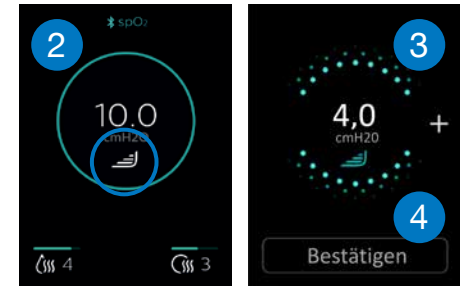

Hinweis: Sobald die Rampe gespeichert ist, wird diese automatisch bei jedem Therapiestart aktiviert, ohne dass das Symbol „Rampe“ erneut angetippt werden muss.

Weitere Funktionen

Anzeige der letzten Therapie-Nacht

Sobald die Therapie beendet wird, erscheint auf dem Display eine Zusammenfassung Ihrer letzten Sitzung. (Tippen Sie auf den blau eingekreisten Text, um mehr zu erfahren.)





Einstellungen (zusätzlich wählbar)

Unter Einstellungen können Sie zusätzliche Änderungen vornehmen. Verstellen Sie den Schlauchdurchmesser nur, wenn Sie einen Schlauch mit anderem Durchmesser nachbestellen.



Anzeige zusätzlicher Therapiedaten unter Berichte

- Tippen Sie unter Einstellungen auf „Berichte anzeigen“
 - Wählen Sie „Berichtsbereich“ (1, 7, 30, 90, 180, 365 Tage)
- ⚠ Die angezeigten Einstellungen können je nach Verordnung variieren.**

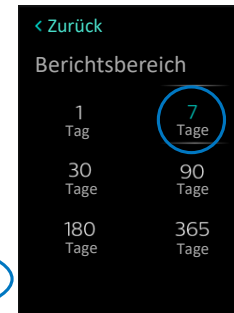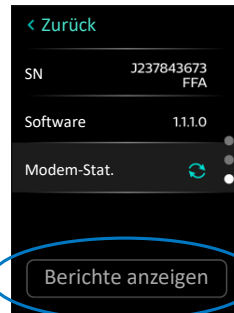

Warmluftbefeuchter einstellen

Die DreamStation 2 verfügt über einen integrierten, adaptiven Warmluftbefeuchter. **Die Heizleistung wird aufgrund der vorhandenen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit vollautomatisch gesteuert** und gewährleistet dadurch eine optimale Befeuchtung. Der Wasserverbrauch kann aus diesem Grund unterschiedlich sein bzw. bei warmer Raumtemperatur kann sich die Befeuchterleistung entsprechend reduzieren.

Der Wassertank des Befeuchters hat MAX Füll-Linien und fasst 325 ml Wasser.
(Bei aktiviertem Befeuchter erscheint ein Symbol unten in der Mitte des Bildes).

Befeuchter Einstellungen

1. Tippen Sie auf das Luftbefeuchtungssymbol, um Ihre aktuelle Einstellung anzuzeigen.
2. Tippen Sie erneut auf das Symbol, bis Sie die gewünschte Luftbefeuchtungsstufe erreicht haben.
Die Luftbefeuchtung kann ausgeschaltet oder von Stufe 1 (Minimum) bis Stufe 5 (Maximum) eingestellt werden.
Wir empfehlen mit Stufe 4 zu beginnen.
3. Nach einigen Sekunden Inaktivität kehrt die Anzeige zum Bildschirm „Therapie EIN“ zurück.



- Aus = Luftbefeuchter ist ausgeschaltet.
Der Heizplatte wird keine Wärme zugeführt
- Stufe 1 = 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Stufe 2 = 74 % relative Luftfeuchtigkeit
Stufe 3 = 77 % relative Luftfeuchtigkeit
Stufe 4 = 81 % relative Luftfeuchtigkeit
Stufe 5 = 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Hinweis: Sobald die Luftbefeuchtung gespeichert ist, wird diese automatisch bei jedem Therapiestart aktiviert.

Reinigung

Warmluftbefeuchter (nur bei Verwendung)

- Tägliche Reinigung per Handwäsche mit einem **pH-neutralen Spülmittel ohne Pflege- und Feuchtigkeitszusätze** von Wassertank, Wassertankabdichtung, Deckel sowie Lufteinlass-/Auslassabdichtung des Luftbefeuchters
- Gründlich abspülen und vollständig an der Luft trocknen lassen
- Keine Desinfektionsmittel, scharfe Haushaltsreiniger oder Reinigungslösungen mit Alkohol verwenden (Nähere Details siehe auch Gebrauchsanweisung)



Schlauch

- **Tägliche Reinigung** per Handwäsche mit einem **pH-neutralen Spülmittel ohne Pflege- und Feuchtigkeitszusätze**



Wiederverwendbarer Pollen-Filter (Hält Hausstaub & Blütenstaub zurück)

- Waschen Sie den Pollen-Filter ausschließlich mit lauwarmen Wasser alle 14 Tage gründlich aus.
- Lassen Sie den Filter komplett trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.



Kontaktinformation



Ignaz-Köck-Straße 20
1210 Wien



homecare@habel-medizintechnik.at



Zubehör, Nachbestellungen und
Krankenkassenabwicklung
01/292 66 42 DW 155



Mo. – Do. 08:00 bis 16:30
Fr. 08:00 bis 14:30



www.habel-medizintechnik.at
www.habel-shop.at



Technische Fragen
01/292 66 42 DW 188

HABEL Homecare

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen. Wir sind österreichweit für Sie da und haben über 45 Jahre Erfahrung im Homecare-Bereich.



Schlafapnoe-Therapie

für erholsamen Schlaf
und erhöhte Lebensqualität



Sauerstoff-Therapie

für maximale Mobilität
und mehr Spontanität



Heimbeatmung

für kontinuierliche Atem-
unterstützung zu Hause



Sekretmanagement

Neue Wege für die nicht-
invasive Sekretmobilisation

Händler Österreich

HABEL
MEDIZINTECHNIK