

Aerogen® Solo

Hochleistungsvernebler
Zusammenbauanleitung



- 01 / Trockene Seite des Luftbefeuchters
- 02 / High-Flow-Nasenadapter Erwachsene
- 03 / High-Flow-Nasenadapter Pädiatrie
- 04 / Am Y-Anschlussstück
- 05 / Kontinuierliche Vernebelung
- 06 / Aerogen Solo Adapter

Vor dem ersten Gebrauch des Aerogen Solo-Systems eine Funktionsprüfung durchführen. Die Funktionsprüfung kann jederzeit wiederholt werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems zu überprüfen.

PM145



Willkommen bei Aerogen

Wir sind stets darum bemüht, Medizinern, Therapeuten und Pflegepersonal auf dem Gebiet der Lungenheilkunde die aktuellsten Informationen über die Bedienung und den Zusammenbau des Aerogen Solo zur Verfügung zu stellen.

Diese praktische Zusammenbauanleitung behandelt die wahrscheinlichsten Aufbauszenarien, die im Krankenhaus auftreten können.

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an:

Innerhalb der USA: 866 423 7643
Weltweit: +353 91 540400

Vielen Dank!

John Power

John Power
CEO Aerogen
john@aerogen.com






Aerogen® Solo
AG-AS3200



T-Stück
AG-AS3010

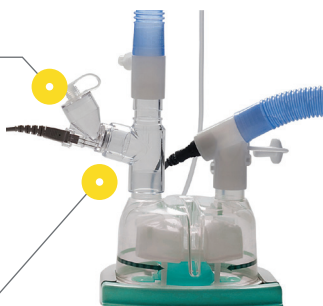

1

Den Aerogen Solo fest auf
das T-Stück drücken.



2

Den Aerogen Solo und das
T-Stück auf der trockenen
Seite des Luftbefeuchters
anbringen.



3

Das Medikament in den
Aerogen Solo füllen.



4

Den Ein-/Aus-Schalter am Aerogen-Steuermodul
eine Sekunde lang drücken, um den
30-Minuten-Modus auszuwählen.

Zur Auswahl des kontinuierlichen
Modus über das Aerogen Pro-X-
Steuermodul den Ein-/Aus-Schalter
im ausgeschalteten Zustand drücken
und drei Sekunden lang gedrückt
halten.



Zur Auswahl des 6-Stunden-Modus über das
Aerogen USB-Steuermodul den Ein-/Aus-Schalter im
ausgeschalteten Zustand drücken und drei Sekunden
lang gedrückt halten.

02 / High-Flow-Nasenadapter Erwachsene


22F mit
Sauerstoffan-
schlussstück*



Aerogen® Solo
AG-AS3200



T-Stück
AG-AS3010

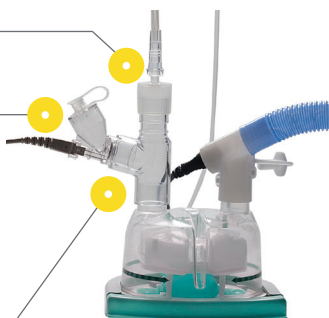

1

Den Aerogen Solo fest auf
das T-Stück drücken.



2

Den Aerogen Solo und das
T-Stück auf der trockenen
Seite des Luftbefeuchters
anbringen.



3

Das Medikament in den
Aerogen Solo füllen.



4

Den Ein-/Aus-Schalter am Aerogen-
Steuermodul eine Sekunde lang drücken,
um den 30-Minuten-Modus auszuwählen.

Zur Auswahl des kontinuierlichen
Modus über das Aerogen Pro-X-
Steuermodul den Ein-/Aus-Schalter
im ausgeschalteten Zustand drücken
und drei Sekunden lang gedrückt
halten.



Zur Auswahl des 6-Stunden-Modus über das
Aerogen USB-Steuermodule den Ein-/Aus-Schalter
im ausgeschalteten Zustand drücken und drei Sekunden
lang gedrückt halten.

*Luftbefeuchterteile werden nicht von Aerogen bereitgestellt. Gebrauchshinweise vom Hersteller einholen. HINWEIS: Bei Verwendung eines großlumigen Schlauchs die Zusammenbau-Anleitung unter „Trockene Seite des Luftbefeuchters“ beachten.






Aerogen® Solo
AG-AS3200



T-Stück
AG-AS3010

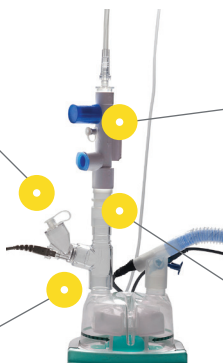

Überdruckventil*



Konnektor
22M-22F*

1

Den Aerogen Solo fest auf
das T-Stück drücken.



2

Den Aerogen Solo und das
T-Stück auf der trockenen
Seite des Luftbefeuchters
anbringen.



3

Das Medikament in den
Aerogen Solo füllen.



4

Den Ein-/Aus-Schalter am Aerogen-
Steuermodul eine Sekunde lang
drücken, um den 30-Minuten-
Modus auszuwählen.


Zur Auswahl des kontinuierlichen
Modus über das Aerogen Pro-X-
Steuermodul den Ein-/Aus-Schalter
im ausgeschalteten Zustand drücken und
drei Sekunden lang gedrückt halten.

Zur Auswahl des 6-Stunden-Modus über das
Aerogen USB-Steuermodule den Ein-/Aus-Schalter
im ausgeschalteten Zustand drücken und drei Sekunden
lang gedrückt halten.



*Luftbefeuchterteile nicht von Aerogen bereitgestellt. Gebrauchshinweise vom Hersteller einholen. HINWEIS: Bei Verwendung eines großlumigen Schlauchs die Zusammenbau-Anleitung unter „Trockene Seite des Luftbefeuchters“ beachten.

04 / Am Y-Anschlussstück

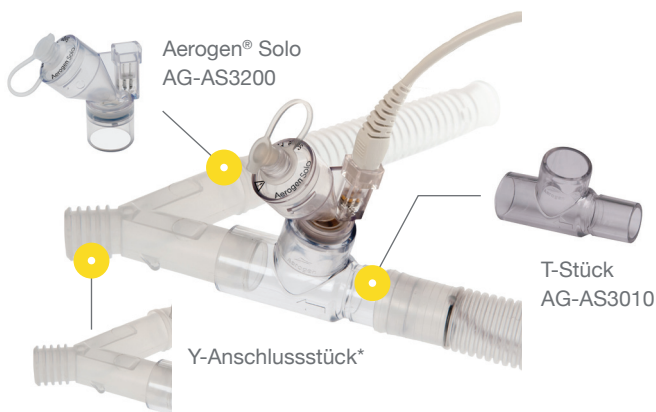

1

Den Aerogen Solo fest auf das T-Stück drücken.



2

Den Aerogen Solo und das T-Stück in den Inspirationsschlauch des Beatmungsschlauchsystems einsetzen.



3

Das Medikament in den Aerogen Solo füllen.



4

Den Ein-/Aus-Schalter am Aerogen-Steuermodul eine Sekunde lang drücken, um den 30-Minuten-Modus auszuwählen.

Zur Auswahl des kontinuierlichen Modus über das Aerogen Pro-X-Steuermodul den Ein-/Aus-Schalter im ausgeschalteten Zustand drücken und drei Sekunden lang gedrückt halten.

Zur Auswahl des 6-Stunden-Modus über das Aerogen USB-Steuermodul den Ein-/Aus-Schalter im ausgeschalteten Zustand drücken und drei Sekunden lang gedrückt halten.



*Teile nicht von Aerogen bereitgestellt. Gebrauchshinweise vom Hersteller einholen.



05 / Kontinuierliche Vernebelung



Am Y-Anschlussstück*



Trockene Seite des
Luftbefeuchters

1

Die Kappe von der mit dem Medikament gefüllten Spritze abnehmen und den Spritzenanschluss des Schlauchs an die Spritze anschließen.



2

Den Schlauch ansaugen und füllen lassen, bis das Medikament das Ende des Schlauchs erreicht.

Hinweis: Das Füllvolumen des Schlauchs beträgt maximal 3,65 ml.



3

Die am Aerogen Solo befestigte Verschlusskappe herausziehen, aber nicht vom Vernebler abnehmen. Den Vernebleranschluss des Schlauchs oben auf den Vernebler schrauben.



4

Die mit dem Medikament gefüllte Spritze in die Spritzenpumpe einführen.

Hinweise zum Gebrauch der Pumpe siehe Bedienungsanleitung der Pumpe oder Herstellerempfehlungen.

Das Steuermodul in den kontinuierlichen Modus schalten. Zur Auswahl des kontinuierlichen Modus den Ein-/Aus-Schalter im ausgeschalteten Zustand drücken und drei Sekunden lang gedrückt halten.

Hinweis: Das Medikament wird tropfenweise vernebelt. Das Gerät im kontinuierlichen Modus überwachen.



*Teile nicht von Aerogen bereitgestellt. Gebrauchshinweise vom Hersteller einholen.



06 / Aerogen Solo Adapter (Aerogen Ultra*)



1

Den Aerogen Solo fest auf den Aerogen Solo Adapter drücken.



2

Das Medikament in den Aerogen Solo füllen.



3

Das Kabel des Aerogen-Steuermoduls am Aerogen Solo anschließen. Wird zusätzlicher Sauerstoff benötigt, den Sauerstoffschlauch anschließen.



4

Den Ein-/Aus-Schalter am Aerogen-Steuermodul eine Sekunde lang drücken, um den 30-Minuten-Modus auszuwählen. Zur Auswahl des kontinuierlichen Modus über das Aerogen Pro-X-Steuermodul den Ein-/Aus-Schalter im ausgeschalteten Zustand drücken und drei Sekunden lang gedrückt halten. Zur Auswahl des 6-Stunden-Modus über das Aerogen USB-Steuermodul den Ein-/Aus-Schalter drücken und drei Sekunden lang gedrückt halten.



* Hinweis: Der Name „Aerogen Solo Adapter“ wird durch „Aerogen Ultra“ ersetzt.



Ausrichtung des Aerogen Solo

Für einen optimalen Einsatz des Aerogen Solo sicherstellen, dass er sich stets in der optimalen Ausrichtung befindet, sowohl im kontinuierlichen als auch intermittierenden Modus.

