



# Komfortable Therapie auch bei höheren Drücken



## ResMed AirFit F20

Zuverlässige Abdichtung  
Hohe Stabilität

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# Innovatives Design & zuverlässige Abdichtung

Die AirFit F20 verfügt über ein innovatives Maskenkissen, das auch bei hohen Therapiedrücken<sup>1</sup> erwiesenermaßen die gewünschte Leistung erbringt. Durch das speziell entwickelte Design passt die Maske für unterschiedlichste Gesichtsformen und -größen. Die AirFit F20 gibt es auch als „for Her“ Variante.

## Universelle Passform

In einer europäischen Studie passte die AirFit F20 94 % aller Anwender.<sup>2</sup>

## Komfortabel

Der flexible, textilmantelte Rahmen bietet zusätzlichen Komfort und sorgt durch sein spezielles Design außerdem für mehr Stabilität und Sichtfreiheit. 92 % der Anwender erreichten einen komfortablen und stabilen Sitz mit der AirFit F20 Maske.<sup>3</sup>

## Zuverlässige Abdichtung

Das besondere Merkmal ist das nachgiebige Maskenkissen, das erwiesenermaßen Leckagen verhindert, sich Ihren Bewegungen anpasst und selbst bei hohen Drücken<sup>1</sup> zuverlässig abdichtet.



## Hochentwickelte Maskenkissen-Technologie mit unterschiedlichen Stärken sorgt für mehr Komfort und Stabilität

### Innovative doppelwandige Schlaufen

für gleichbleibend stützenden Halt und eine zuverlässige Abdichtung

### Mattierte Silikonoberfläche

weichere Textur des Maskenkissens im empfindlichen Nasenbereich

### Polierte Silikonoberfläche

für eine angenehme, zuverlässige Abdichtung im Bereich von Mund und Kieferpartie

### Weicher Nasenrücken

passt sich dem Nasenrücken des Patienten an – für mehr Komfort

### Anpassungsfähige Flügel

passen sich einer Vielzahl von Gesichtsformen an

### Stützender Rand

gibt den anpassungsfähigen Bereichen des Maskenkissens die erforderliche Stabilität

### Konturierter Kinnbereich

unterstützt den Tragekomfort und die Abdichtungsleistung bei Bewegung

Komfort Stabilität



## Freies Blickfeld

Der Rahmen verläuft unterhalb der Augen und sorgt für Stabilität bei gleichzeitig wenig Gesichtskontakt – das bedeutet mehr Bewegungs- und Sichtfreiheit.

## Bequem und geschmeidig

Das Kopfband aus besonders weichem Textilgewebe passt sich verschiedenen Kopfformen & -größen an.

## Weicher, flexibler Rahmen

Der flexible Rahmen passt sich an unterschiedlichste Gesichtsformen an. Die Polsterung bietet zusätzlichen Komfort.

## Schnelles Anlegen

Die AirFit F20 lässt sich in weniger als einer Minute anlegen. Die magnetischen Clips ermöglichen ein sekundenschnelles An- und Ablegen der Maske.



## Mehr Bewegungsfreiheit

Das Kniestück lässt sich durch die Schnelllösefunktion unkompliziert anschließen und abnehmen. Die 360°-Drehbarkeit sorgt für mehr Bewegungsfreiheit.



## AirFit F20 for Her

Speziell für Frauen entwickelt, in einer etwas kleineren, den weiblichen Gesichtskonturen angepassten, Größe.

## QuietAir Kniestück (optional)

Reduziert die Geräuschentwicklung auf nur 21 dB(A)<sup>2</sup> und verteilt die ausgeatmete Luft sanft, sodass Sie eine angenehme Nachtruhe genießen können.



## Anpassungstipps



### 1. Schritt

Stellen Sie zuerst sicher, dass die Magneten an den unteren Bändern von den Clips gelöst sind. Wenn sie nicht gelöst sind, ziehen Sie sie mit einer Drehbewegung vom Rahmen ab.



### 2. Schritt

Halten Sie die Maske an Ihr Gesicht. Achten Sie dabei darauf, dass der obere Maskenrand auf Höhe der Nasenwurzel verläuft. Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf. Achten Sie darauf, dass das ResMed-Logo dabei nach außen zeigt.



### 3. Schritt

Positionieren Sie die unteren Bänder so, dass sie unterhalb der Ohren verlaufen. Verbinden Sie die Magneten mit dem jeweiligen Clip auf dem Rahmen.



### 4. Schritt

Passen Sie die Verschlüsse auf den oberen Bändern so an, dass die Maske gerade und stabil sitzt. Befestigen Sie die Verschlusslaschen wieder.



### 5. Schritt

Passen Sie die Verschlüsse auf den unteren Bändern so an, dass die Maske gerade und stabil sitzt. Befestigen Sie die Verschlusslaschen wieder.



### 6. Schritt

Verbinden Sie den Luftschlauch des Therapiegeräts mit dem Kniestück. Führen Sie dann das Kniestück in den Anschluss an der Maskenvorderseite ein, sodass es mit einem Klicken einrastet.

## Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
AirFit F20 Full Face Maske	7763405 (S), 7763406 (M), 7763407 (L)	1
AirFit F20 Full Face Maske for her	7763408 (S), 7763409 (M)	1

## HABEL Atemzentren ganz in Ihrer Nähe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen. Sie erhalten modernste Therapiegeräte, umfangreiche und kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite Betreuung.



Quellen: (1) AirFit F20 is validated at therapy pressures from 3 to 40 cm H<sub>2</sub>O. Refer to AirFit F20 user guide. (2) Noise emission values in accordance with ISO 4871 at a distance of 1 m, with uncertainty of 3 dBA. Refer to AirFit F20 user guide. (3) ResMed fitting study of 39 patients, conducted in 2015. Data on file; ID A3830701.