



Mehr Bewegungsfreiheit in der Schlafapnoe-Therapie



ResMed AirFit F30

Freies Sichtfeld
Stabiler Maskenhalt

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Stabiler Maskensitz und freies Sichtfeld


Die AirFit F30 mit ihrem innovativen Maskenkissen ist noch kleiner und unauffälliger als andere Mund-Nasen Masken. Sie ermöglicht einen bequemen Sitz, maximale Sicht- und Bewegungsfreiheit und verhindert Druckstellen auf dem Nasenrücken.

Minimale Kontaktfläche ohne Druckstellen

Die AirFit F30 ist nicht nur deutlich kleiner, sondern bietet auch eine minimale Kontaktfläche. Die Maske ist so konzipiert, dass die Nase von unten umschlossen und so kein Druck auf den empfindlichen Nasenrücken ausgeübt wird. Sie bietet hohe Stabilität, ein freies Sichtfeld und weniger Gesichtskontakt. Das ermöglicht Ihnen das Tragen einer Brille, Lesen oder Fernsehen.



Hochentwickelte Maskenkissen-Technologie mit unterschiedlichen Stärken sorgt für mehr Komfort und Stabilität

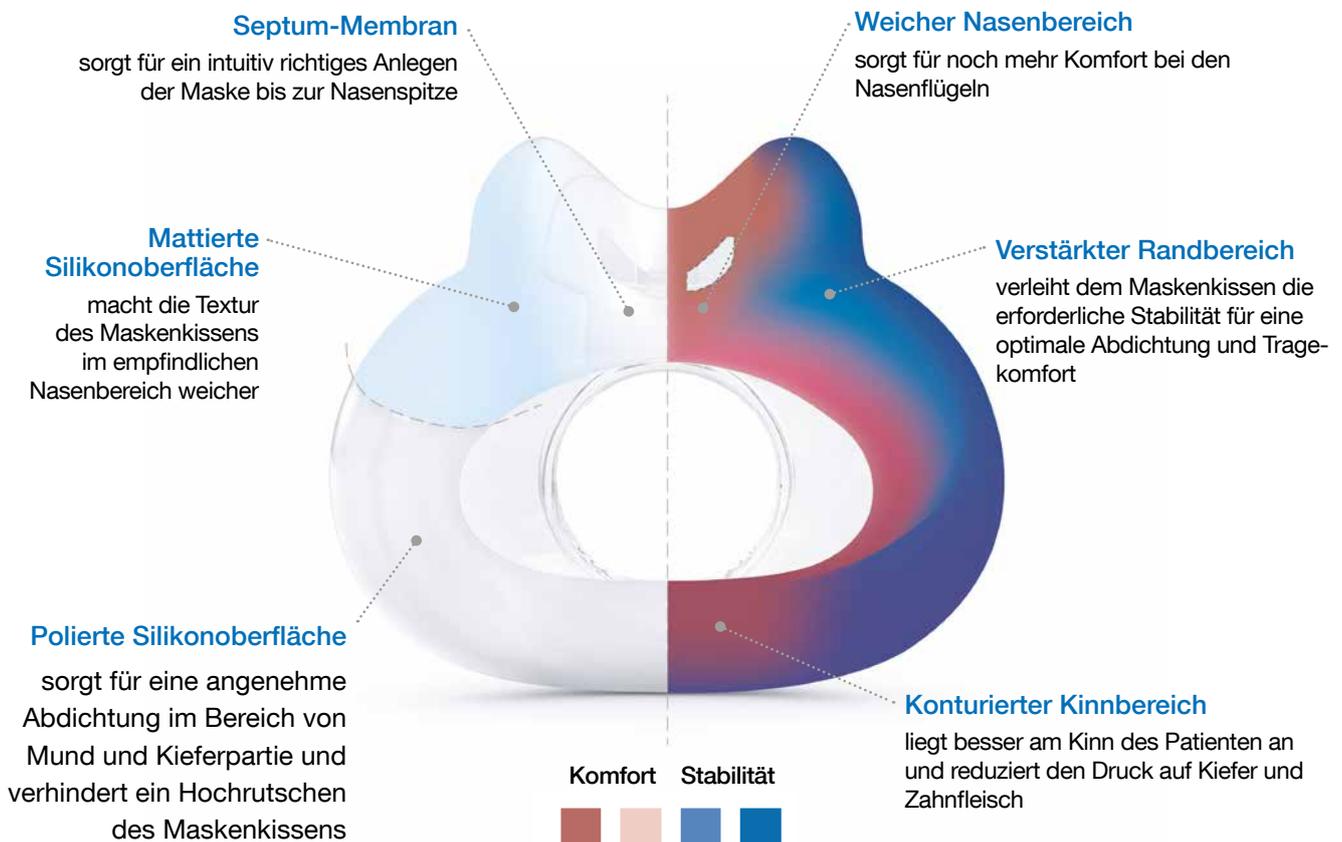

Wenige Komponenten

Mit nur einem Rahmen, einem Kopfband und zwei Maskenkissen ist die Maskenanpassung einfach und schnell durchzuführen.

Kleine Auflagefläche, hohe Stabilität

Der ultrakompakte Maskenrahmen sorgt rundum für Stabilität, ein freieres Blickfeld und weniger Gesichtskontakt.



Schnelle und präzise Anpassung

Das Anlegen und Abnehmen der Maske ist einfach und intuitiv dank der praktischen Magnetclips, die das Kopfband in Sekundenschnelle mit dem Rahmen verbinden.

Mehr Bewegungsfreiheit

Die Schnelllösefunktion und 360°-Drehbarkeit des Kniestücks ermöglicht ein schnelles Anbringen und Abnehmen der Maske und mehr Bewegungsfreiheit während der Nacht.

Anpassungstipps



1. Schritt

Lösen Sie beide Magnetclips. Halten Sie das Maskenkissen von unten an Ihre Nase und ziehen Sie dann das Kopfband über den Kopf.



2. Schritt

Führen Sie die unteren Kopfbänder unter den Ohren entlang und befestigen Sie die Magnetclips am Rahmen.



3. Schritt

Lösen Sie die Klettverschlüsse der oberen Kopfbänder und ziehen Sie die Bänder gleichmäßig an. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den unteren Kopfbändern.



4. Schritt

Wenn das Kopfband zu dicht am Ohr verläuft, justieren Sie das Band oben am Kopf.



5. Schritt

Verbinden Sie den Schlauch des Geräts mit dem Kniestück.



6. Schritt

Befestigen Sie dann das Kniestück vorn an der Maske und schalten Sie das Gerät ein.

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
AirFit F30 Full Face Maske	776050 (S), 776056 (M)	1

HABEL Atemzentren ganz in Ihrer Nähe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen.

Sie erhalten modernste Therapiegeräte, umfangreiche und kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite Betreuung.

