



Freies Blickfeld und stabiler Maskenhalt



**ResMed AirFit N20 –
da passt einfach alles**

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Optimaler Tragekomfort und zuverlässige Abdichtung

Durch ihr kompaktes Design sorgt die AirFit N20 für ein freies Blickfeld. Das sorgfältig gestaltete Maskenkissen dichtet zuverlässig ab und macht jede Bewegung problemlos möglich.

Einfache Anpassung


In einer internationalen Studie zeigte sich, dass die neue AirFit N20 99,4 % aller Anwender passt.¹ Dank des flexiblen Maskenkissens, das sich an die unterschiedlichsten Gesichtsformen und -größen anpasst, sitzt die Maske gleich von Anfang an richtig.

Komfortabel

Vom Maskenkissen über den Maskenrahmen bis zum Kopfband – die AirFit N20 ist rundum leicht und geschmeidig. Ausatemöffnungen aus Maschengewebe sorgen dafür, dass sie flüsterleise ist. 92 % der Patienten fanden die AirFit N20 angenehmer zu tragen als die derzeit verwendete Nasenmaske.²

Freie Sicht

Das schlanke Design und ein Rahmen mit minimalem Gesichtskontakt halten das Blickfeld frei, sodass Sie lesen oder fernsehen können.

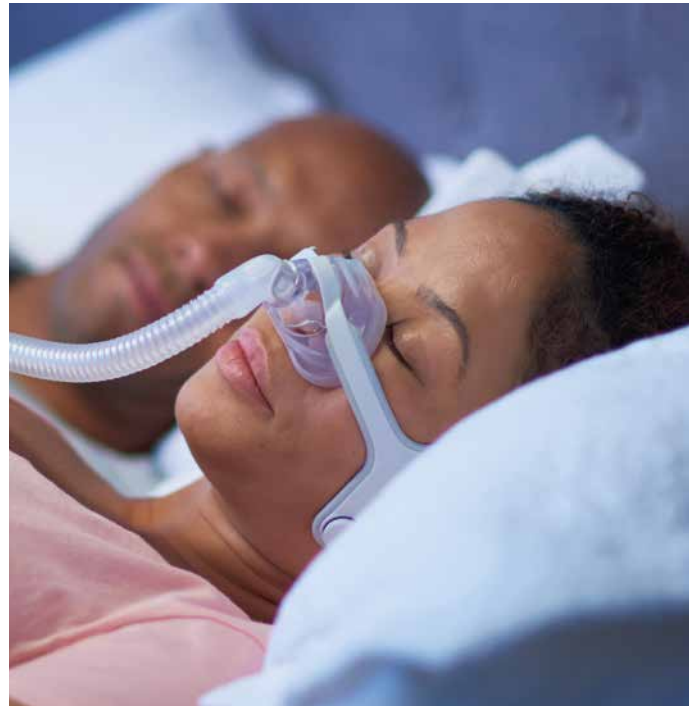

Hochentwickelte Maskenkissen-Technologie mit unterschiedlichen Stärken sorgt für mehr Komfort und Stabilität

Innovative doppelwandige Schlaufen

sorgen für stützenden Halt – unabhängig von Gesichtsform, Therapiedruck oder Maskenbewegung

Flexibel im Inneren

polstert den sensiblen Wangenbereich mit konturiertem Silikon – für einen guten Sitz oberhalb der Nasenflügel

Flexibler Bereich

für mehr Beweglichkeit im Bereich der Oberlippe

Weicher Nasenrücken

passt sich dem Nasenrücken an – verhindert Druckstellen

Anpassungsfähige Flügel

für verschiedene Nasenformen und -größen


Verstärkung an den Seiten

sorgt im Bereich entlang der Wangen für zusätzliche Stabilität und Abdichtung

Beweglich und weich

um Druck auf die Oberlippe zu reduzieren

Komfort Stabilität

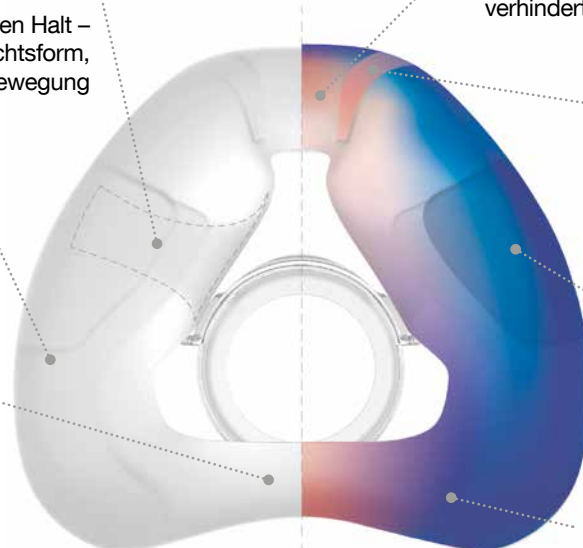

Freies Blickfeld

Der Rahmen verläuft unterhalb der Augen und sorgt für Stabilität bei gleichzeitig wenig Gesichtskontakt – das bedeutet mehr Bewegungs- und Sichtfreiheit.

Weich und geschmeidig

Das Kopfband aus besonders weichem Textilgewebe passt sich verschiedenen Kopfformen und -größen an und sorgt für eine angenehme Therapie.

Zuverlässige Abdichtung

Das spezielle Design des Maskenkissens vermeidet Leckagen, toleriert ungenaues Anlegen und dichtet auch bei variablen Drücken gut ab.

Freie Beweglichkeit

Ein kurzer, flexibler Schlauch, der das Kniestück mit dem Geräteschlauch verbindet, ermöglicht freie Bewegungen und verhindert Zug auf den Schlauch sowie undichte Stellen.

Gepolsterter Rahmen

Der Rahmen ist auf der Innenseite gepolstert, sodass er an jedem Kontaktpunkt mit dem Gesicht angenehm weich aufliegt.

Schnelles Anlegen

Die magnetischen Clips und das Schnellspannsystem ermöglichen ein sekundenschnelles An- und Ablegen der Maske. Anpassen und Reinigen werden zum Kinderspiel.

AirFit N20 for Her

Speziell für Frauen entwickelt, in einer etwas kleineren, den weiblichen Gesichtskonturen angepassten, Größe.



Anpassungstipps



1. Schritt

Stellen Sie zuerst sicher, dass die Magneten an den unteren Bändern von den Clips gelöst sind. Wenn sie nicht gelöst sind, ziehen Sie sie mit einer Drehbewegung vom Rahmen ab.



2. Schritt

Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf. Achten Sie darauf, dass das ResMed-Logo dabei nach außen zeigt.



3. Schritt

Positionieren Sie die unteren Bänder so, dass sie unterhalb der Ohren verlaufen. Verbinden Sie die Magneten mit dem jeweiligen Clip auf dem Rahmen.



4. Schritt

Passen Sie die Verschlüsse auf den oberen Bändern so an, dass die Maske gerade und stabil sitzt. Befestigen Sie die Verschlusslaschen wieder.



5. Schritt

Passen Sie die Verschlüsse auf den unteren Bändern so an, dass die Maske gerade und stabil sitzt. Befestigen Sie die Verschlusslaschen wieder.



6. Schritt


Verbinden Sie den Luftschlauch des Therapiegeräts mit dem Kniestück, führen Sie dann das Kniestück in den Anschluss an der Maskenvorderseite ein, sodass es mit einem Klicken einrastet.

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
AirFit N20 Nasenmaske	7763509 (S), 7763511 (M), 7763512 (L)	1
AirFit N20 Nasenmaske for her	7763510 (S)	1

HABEL Atemzentren ganz in Ihrer Nähe

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen. Sie erhalten modernste Therapiegeräte, umfangreiche und kompetente Serviceleistungen sowie eine bundesweite Betreuung.

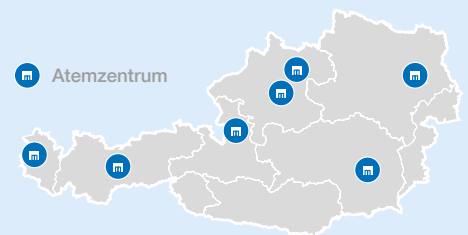

Quellen: (1) ResMed AirFit N20 internal global fitting study of 159 existing ResMed patients, conducted 12 / 11 / 2015 ; ID A3697629. (2) ResMed internal study of 24 existing ResMed patients, conducted between 23 / 11 / 2015 – 21 / 12 / 2015 comparing the market leading mask with AirFit N20; ID A3695085.