

Philips/Respironics REMStar CPAP- und BiPAP Systeme Gerätereinigung und Desinfektion



Für zu Hause

Reinigen Sie das Gehäuse Ihres Therapiegerätes mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmittel.

ACHTUNG: Trennen Sie das Gerät vorher von der Stromversorgung und achten Sie darauf, dass **kein Wasser in die elektrischen Teile des Gerätes eindringt**.

Ausführlichere Anleitungen zur Reinigung finden Sie auch in den Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Produkte.

Für den Einsatz im Krankenhaus

Bringen Sie das Desinfektionsmittel auf ein weiches, fusselfreies Stofftuch auf oder verwenden Sie ein Einmaltuch. **Das Stoff- bzw. Einmaltuch** sollte gut durchtränkt sein, aber **nicht tropfen**. Wischen Sie das Desinfektionsmittel über die gesamte Außenfläche des Beatmungsgeräts.

Für die Oberflächendesinfektion sind bei allen Philips/Respironics CPAP- und BiPAP-Systemen folgende Produkte zugelassen:

- Mikrocid AF Liquide
- Mikrocid AF Wipes
- Incidin Liquide
- Incidur
- Schülke Perform 1%
- Antiseptica 1%

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Hersteller sowie die vorgegebenen Einwirkzeiten.