

# Sichere Fixierung von Trachealtuben und -kanülen



## ET-Tubus und Kanülenfixationen

keine Hautreizungen  
schnelle & einfache Handhabung

**HABEL**  
MEDIZINTECHNIK

# ET-Tubus Fixationen – schnelle und einfache Handhabung

Die Endotrachealtubus-Halter bieten eine sichere und schnelle Fixation und zuverlässige Stabilisierung von ET-Tuben nach der Intubation. Sie können in Rücken- oder Bauchlage verwendet werden und ermöglichen eine sichere Fixierung des Tubus durch die Kombination von einem Klebestreifen mit Führungskanal und dem verstellbaren Nackenband.



## Vorteile & Eigenschaften

- Verhindern eine unbeabsichtigte Extubation und das Verrutschen des Tubus
- Für Tuben von 7–10 mm geeignet
- Tubusschiene zur schnellen und einfachen Neupositionierung des ET-Tubus (Artikel 52280)
- Ermöglichen einfachen Zugang für die Mundpflege
- Verhindern das Abknicken des Tubus

## Klebestreifen

- Hautfreundlicher Klebstoff kann bis zu 3 Tage am Patienten verbleiben
- Sanft zu empfindlicher Haut ohne reizende Rückstände, die entfernt werden müssen
- Für eine bequeme und einfache Anpassung an den Patienten



## Gepolstertes und verstellbares Nackenband

- Weich und angenehm für Gesicht und Hals
- Klettverschlüsse sorgen für einen sicheren Sitz
- Besonders einfach anzulegen
- Kann mit oder ohne Beißblock verwendet werden
- Ermöglicht eine schnelle, einfache Neu-  
positionierung durch Lockern des Bandes



**StabiLock Endotrachealtubus-Halter**



**BreezeLock Endotrachealtubus-Halter**


## Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
StabiLock ET-Tubus Fixation für Erwachsene	52270	10
BreezeLock ET-Tubus Fixation für Erwachsene mit flexibler Tubusschiene und Klebeband	52280	10


# Tracheostomiekanülen-Fixation




## Anwendung

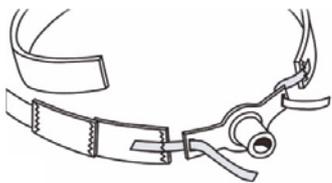


1. Die langen, schmalen Befestigungslaschen durch die Ausnehmungen an der Tracheostomieplatte ziehen.

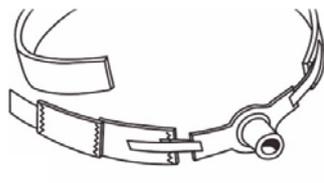

2. Die Laschen über den Flansch zurückbiegen und am Nackenband befestigen. Eine längere Schlaufe an den Befestigungslaschen lassen, um eine Verschmutzung des Nackenbands zu vermeiden.

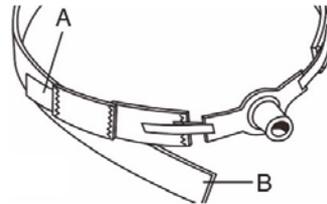

3. Die Befestigungslasche des kurzen Abschnitts (A) am langen Nackenbandabschnitt (B) befestigen. Für die richtige Länge justieren.

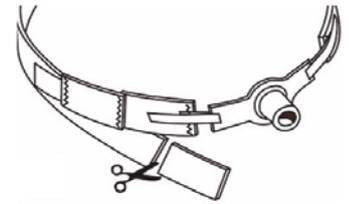

4. Überschüssiges Material abschneiden.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Speziell dehnbarer Bereich des Nackenbandes kompensiert Hustenreflexe
- Keine Hautreizungen durch die hautfreundliche Klebefläche. Das Halteband besteht aus besonders weichem und hypoallergenem Material.
- Einfache und schnelle Handhabung durch elastisches Nackenband mit Velcro-Verschluss, zusätzliche Pflaster sind überflüssig.
- Latexfrei

## Bestellhinweis

Artikel	Halsgröße	Art.-Nr.	VE/Stk.
Tracheostomiekanülen-Fixation für Erwachsene	bis zu 49,5 cm	52240	10
Tracheostomiekanülen-Fixation für adipöse Erwachsene	bis zu 71 cm	52244	10