



Philips DreamStation AutoCPAP

Kurzanleitung

Dieses Dokument ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
Vollständige Informationen finden Sie in der originalen Philips Gebrauchsanweisung.

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Zusammensetzen der DreamStation mit Warmluftbefeuchter




Stromversorgung

Stecken Sie das Netzkabel an der Hinterseite des Geräts an.



Öffnen des Warmluftbefeuchters

Schieben Sie die Entriegelungstaste in Richtung des Therapiegeräts. Drücken Sie die Klappe des Befeuchters so weit nach oben, bis sie vollständig geöffnet ist.

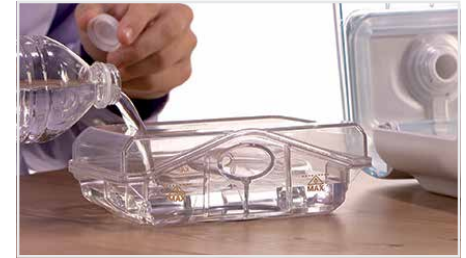

Entnehmen und Befüllen des Wassertanks

Heben Sie den Wassertank aus der Befeuchterbasis. Füllen Sie anschließend den Wassertank mit destilliertem Wasser bis zur markierten Füllhöhe.



Schließen des Befeuchters

Setzen Sie den Wassertank vorsichtig wieder in den Befeuchter ein und schließen Sie die Abdeckung, bis sie einrastet.



Trennen des Therapiegeräts vom Befeuchter

Drücken Sie die graue Entriegelungstaste (1) unten auf der Seite des Therapiegeräts und ziehen Sie Therapiegerät und Befeuchter auseinander, um sie voneinander zu trennen.



Anschluss des Schlauchs und der Maske

Schließen Sie den Schlauch an die Auslassöffnung oben auf Ihrem Befeuchter oder auf der Rückseite Ihres Therapiegeräts an, wenn Sie keinen Befeuchter verwenden.

Therapie starten

1. Ein/Aus Taste

Drücken Sie die „EIN/AUS Taste“, um die Therapie zu starten. (Bei der DreamStation kann optional auch eine Einschaltautomatik beim Atmen durch die Maske aktiviert sein.)

2. Rampentaste (optional)

Wenn ein Rampenanfangsdruck für Sie verordnet wurde, startet das Gerät mit einem niedrigeren Druck und erhöht diesen schrittweise bis der eingestellte Therapiedruck erreicht ist. (Diese Funktion kann sowohl am Beginn als auch während der Nacht aktiviert werden und erleichtert die Therapie.)



Speicherkarte



Pollenfilter

Einstellung des Warmluftbefeuchters

Bei trockenen Atemwegen kann **optional** ein Warmluftbefeuchter an das Gerät angeschlossen werden.

Im **adaptiven Befeuchtermodus** (Standardeinstellung) **reguliert der Warmluftbefeuchter die Heizleistung vollautomatisch** aufgrund der vorhandenen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Wasserverbrauch kann daher unterschiedlich sein.

Einfache Bedienung



Einstellung der Befeuchter-Stärke

1. Starten Sie Ihre Therapie
2. Drehen Sie den Drehknopf, um Ihre gewünschte Heiz- und Befeuchtungsstufe auszuwählen (1 = niedrigste bis 5 = höchste Stufe, 0 = deaktiviert).



Display Anzeige der gewählten Heiz- und Befeuchtungsstufe

Im unteren rechten Eck des Displays sehen Sie Ihre aktuell-eingestellte Stufe.

Anwendungshinweise

Kondenswasser im Schlauch

- **Stellen Sie Ihr CPAP-Gerät** mit dem Befeuchter **unterhalb der Bettkante auf**, sodass das Kondenswasser in den Befeuchter fließen kann.
- **Verringern Sie den Temperaturunterschied** zwischen der Raumluft und der Luft im Schlauch
 - durch eine CPAP Schlauchhülle
 - durch Verringern der Befeuchterstufe oder Erhöhen der Heizstufe

Trockenheit trotz Stufe 5

- **Ändern Sie den Modus Ihres Warmluftbefeuchters** unter Einstellungen auf dem Display von „Adaptiv“ (= automatische Regelung der Heizleistung) zu „Fixiert“ (= fixe Heizleistung). Falls diese Auswahlmöglichkeit nicht angezeigt wird, kontaktieren Sie bitte unsere HABEL Atemzentren.

Besonders einfaches Anwender-Menü

- Übersichtlich gegliedertes Patientenmenü
 - Sehr gut ablesbares Farb-Display
 - Umgebungslichtsensor dimmt automatisch den Bildschirm im Dunkeln
- ▲ Die angezeigten Einstellungen können je nach Verordnung variieren.





Intuitive Menü-Führung





Meine Infos

Über dieses Untermenü können Sie auf Informationen zu Ihrer Therapie, z. B. Therapiestunden, zugreifen.

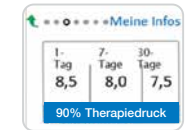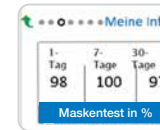


Mein Betreuer

Über dieses Untermenü können Sie auf Informationen zu Ihrem Gerät zugreifen oder den Leistungs-Selbsttest der DreamStation starten.

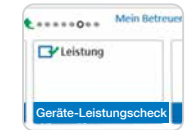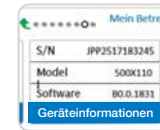

Meine Einstellungen

Über dieses Untermenü können Sie einige individuelle Einstellungen vornehmen, die Ihnen die Therapie nochmals erleichtern.

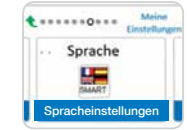

Besuchen Sie unseren YouTube Kanal für kurze und einfache Erklärungen zu Ihrem CPAP-Gerät sowie etwaigem Befeuchter. www.youtube.com/c/HABELMedizintechnik

Reinigung

Warmluftbefeuchter (nur bei Verwendung)

- Tägliche Reinigung per Handwäsche mit einem **pH-neutralen Spülmittel ohne Pflege- und Feuchtigkeitszusätze** von Wassertank, Wassertankabdichtung, Deckel sowie Lufteinlass-/Auslassabdichtung des Warmluftbefeuchters
- Gründlich abspülen und vollständig an der Luft trocknen lassen
- Keine Desinfektionsmittel, scharfe Haushaltsreiniger oder Reinigungslösungen mit Alkohol verwenden (Nähere Details siehe auch Gebrauchsanweisung)



Schlauch

- **Tägliche Reinigung** per Handwäsche mit einem **pH-neutralen Spülmittel ohne Pflege- und Feuchtigkeitszusätze**



Wiederverwendbarer Pollen-Filter

- Waschen Sie den Pollen-Filter alle 14 Tage ausschließlich mit lauwarmen Wasser gründlich aus.
- Lassen Sie den Filter komplett trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Gerät einsetzen.



Auch digital für Sie da

Wir sind Ihr verlässlicher und kompetenter Partner. Um Sie noch umfassender zu betreuen, bieten wir Ihnen auch auf unseren digitalen Kanälen hilfreiche Tipps und Anwendungshinweise rund um Ihre Therapie.



Facebook

Besuchen Sie uns für nützliche Infos über uns und unsere Aktivitäten: von A für Atemwegserkrankungen bis Z für Zystische Fibrose.

www.facebook.com/HABELMedizintechnik



Instagram

Hier finden Sie interessante Tipps und Fakten rund um Themen wie Schlaf, CPAP, Lunge, Sauerstoff- und Asthma-Therapie.

www.instagram.com/habel_medizintechnik



YouTube

Abonnieren Sie unseren Kanal für praktische Anwendungshinweise, Erfahrungsberichte und Tipps.

www.youtube.com/c/HABELMedizintechnik



Google

Ihre Meinung ist uns wichtig! Bewerten Sie uns auf Google.

g.page/habel-medizintechnik/

Kontaktinformation



Ignaz-Köck-Straße 20
1210 Wien



homecare@habel-medizintechnik.at



Zubehör, Nachbestellungen und
Krankenkassenabwicklung
01/292 66 42 – 155



Mo. – Do. 08:00 bis 16:30
Fr. 08:00 bis 14:30



www.habel-medizintechnik.at
www.habel-shop.at



Technische Fragen
01/292 66 42 – 188

HABEL Homecare

Ihre erfolgreiche und komfortable Therapie sowie die Verbesserung Ihrer Lebensqualität liegen uns am Herzen. Wir sind österreichweit für Sie da und haben über 45 Jahre Erfahrung im Homecare-Bereich.



Schlafapnoe-Therapie

für erholsamen Schlaf
und erhöhte Lebensqualität



Sauerstoff-Therapie

für maximale Mobilität
und mehr Spontanität



Heimbeatmung

für kontinuierliche Atem-
unterstützung zu Hause



Sekretmanagement

Neue Wege für die nicht-
invasive Sekretmobilisation

Händler Österreich

HABEL
MEDIZINTECHNIK