


Auf Zeichen eines akuten Herzstillstands überprüfen:

- ☑ Patient nicht ansprechbar
- ☑ Keine normale Atmung


**1 ZIEHEN**

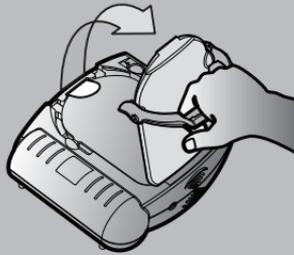

**2 PLATZIEREN**




**3 DRÜCKEN**

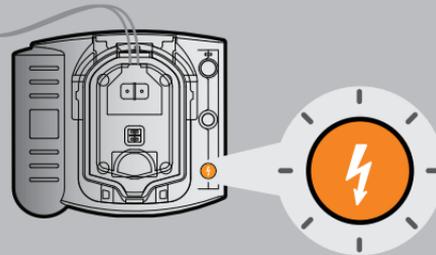

KURZANLEITUNG


## DETAILLIERTE ANWEISUNGEN

Zum Starten: Griff ziehen. Schutzabdeckung entfernen.

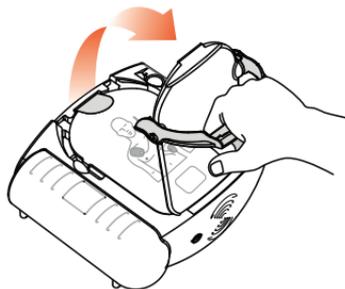


1

Alle Kleidungsstücke vom Brustkorb des Patienten entfernen. Falls nötig, die Haut reinigen und trocknen.


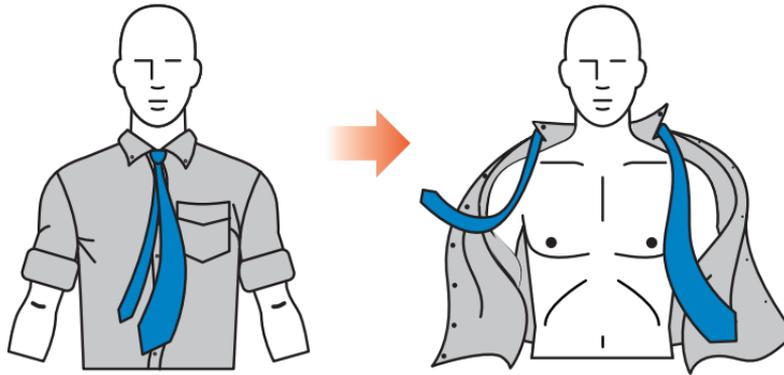


Versiegelung abziehen und Elektroden entfernen.


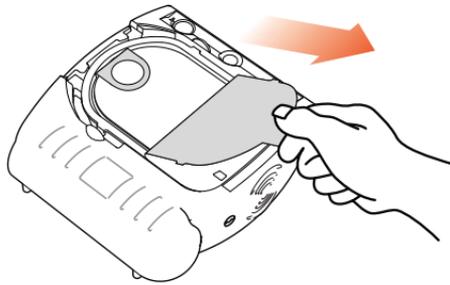


3

Elektroden von der gelben Folie abziehen.

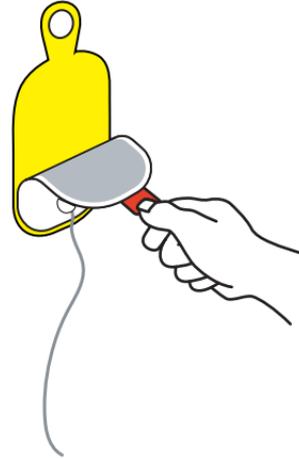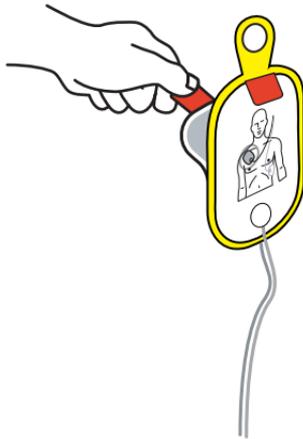

Elektroden wie abgebildet aufkleben.

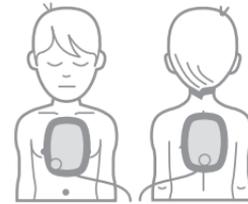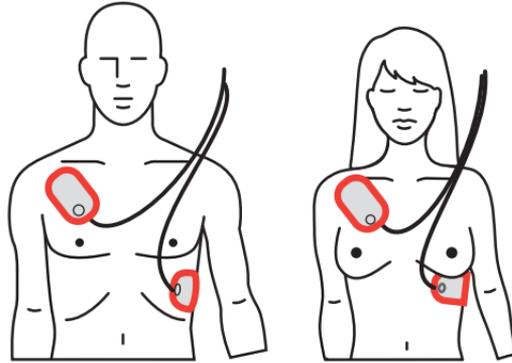


(0-8 JAHRE) < 25 kg

Herzrhythmus wird analysiert...  
Den Patienten nicht berühren!


Warten, bis  nicht mehr blinkt



Zur Schockabgabe: Blinkende **ORANGEFARBENE**  
Schocktaste drücken. Den Patienten nicht berühren.

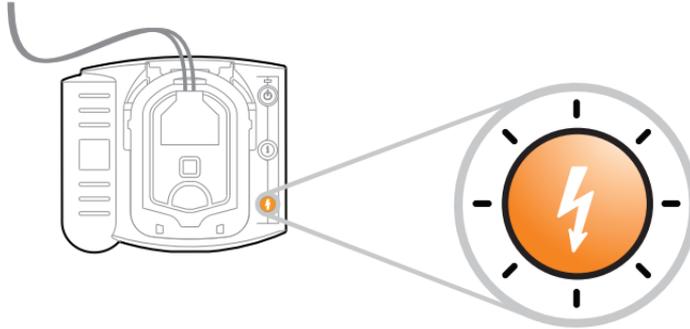


Für Hilfe bei der HLW: Blinkende **BLAUE** Taste drücken.

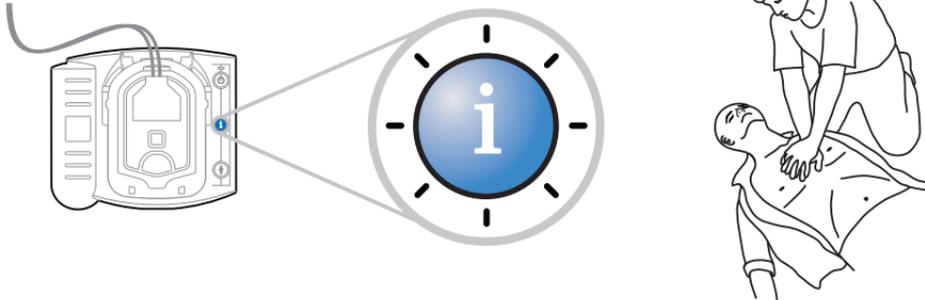


30 Kompressionen • Nase zuhalten, Kopf überstrecken • 2 volle Atemstöße

8

Zum Einschalten: **GRÜNE** Ein/Aus-Taste drücken.

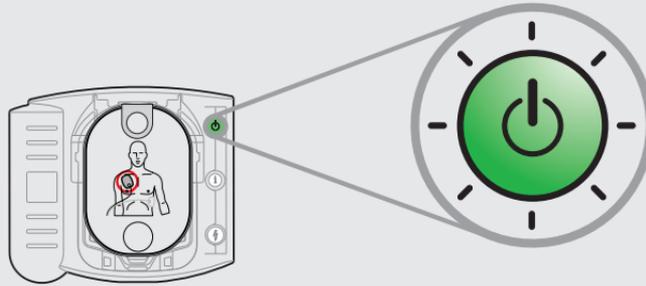

Wenn die Kassette ausgewechselt werden muss:  
Riegel verschieben.

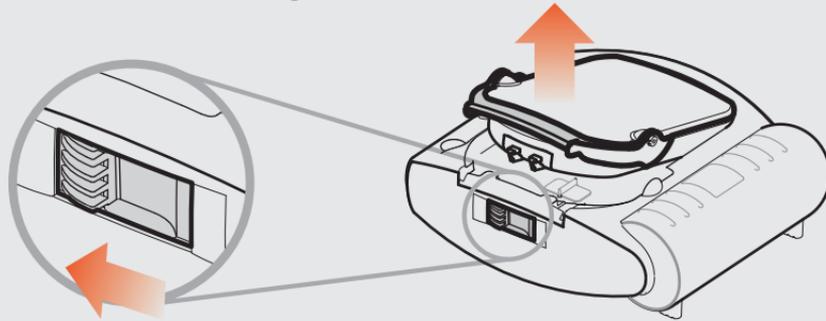

Printed in USA

Philips Medical Systems  
Seattle, WA 98121

Copyright © 2008  
Philips Electronics North American Corp

011836 REVVIII

M 5 0 6 6 - 9 7 8 0 2



0 1 1 8 3 6 - 0 0 0 7

**PHILIPS**