



Optimale Versorgung der Nabelschnur



Cetro Nabelschnurring

Weiches, elastisches Material
Muss nicht entfernt werden



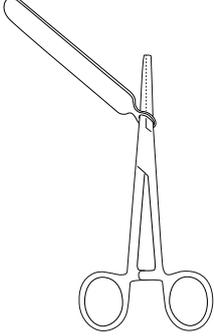
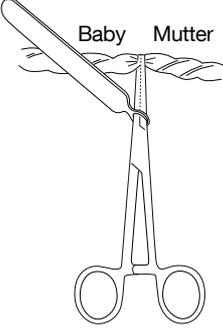
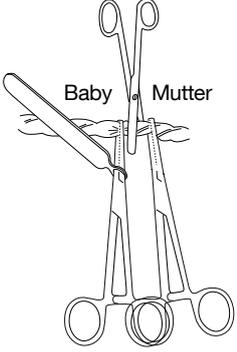
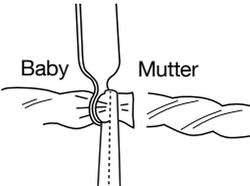
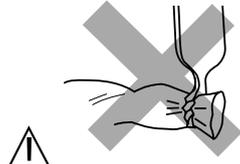
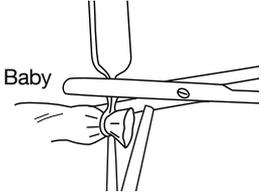
Anleitungsvideo

HABEL
MEDIZINTECHNIK

Innovative Alternative zur Nabelklemme

Der Cetro Nabelschnurring bietet eine anwenderfreundliche und nachhaltige Möglichkeit zum Abklemmen der Nabelschnur nach der Geburt. Durch das flexible Material ist er besonders einfach anzuwenden und muss nicht entfernt werden. Das weiche Material aus Kunststoff oder Latex sorgt für ein höheres Wohlbefinden der Mutter und des Neugeborenen und ermöglicht eine einfachere Pflege des Nabelstumpfes. Damit ist er eine optimale Alternative zur herkömmlichen Nabelklemme.

Gebrauchsanweisung

<p>1</p>  <p>Den Nabelschnurring auf die Arterienklemme ziehen. Den Nabelschnurring nicht mehr als notwendig dehnen. Dies kann dazu führen, dass der Ring kaputtgeht.</p>	<p>2</p>  <p>Klemmen Sie die Nabelschnur mit der Arterienklemme nah am Kind ab. Achtung! Achten Sie darauf dass die Spitze der Arterienklemme Kante an Kante mit der zusammengepressten Seite der Nabelschnur liegt.</p>	<p>3</p>  <p>Platzieren Sie zur Mutter hin eine Arterienklemme neben der anderen. Schneiden Sie mit der Nabelschere die Nabelschnur zwischen den Arterienklemmen ab.</p>
<p>4</p>  <p>Nehmen Sie die Ziehplatte des Nabelschnurrings und ziehen Sie den Nabelschnurring von der Arterienklemme ab und über die Nabelschnur.</p>	<p>5</p>  <p>Vermeiden Sie, dass sich der Ring der Nabelschnur wie auf dem Bild verdreht. Dies kann dazu führen, dass sich der Ring löst.</p>	<p>6</p>  <p>Schneiden Sie die Ziehplatte des Nabelschnurrings im Abstand von 1 mm vom Ring des Nabelschnurrings ab, der nun rund um die Nabelschnur liegt. Lösen Sie die Arterienklemme.</p>

Bestellhinweis

Artikel	Art.-Nr.	VE/Stk.
Nabelschnurring aus Kunststoff 	149607S	300
Nabelschnurring aus Latex 	149607	300